


| NÁVOD K POUŽITÍ | |  ... intenzivní péče |
|--------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název výrobku: | | |
| ANTIBAKTERIÁLNÍ NAVLHČENÁ HYGIENICKÁ ŽÍNKÁ | | Katalogové číslo |
| Hygiena - H | Počet stran: 1/2 | 75.990.00.006 |

Popis výrobku:


- jednorázové žínky
- ideální pro omývání pacientů
- s heřmánkem a Aloe vera
- bez alkoholu a lanolínu
- ph 5,5
- snižuje riziko kontaminace
- **zanechává pokožku čistou, svěží a voňavou**
- vhodné pro infekční pacienty, zejména s MRSA

Návod k použití:

1. Odloupněte štítek pro otevření, aniž byste ho celý odstranili.
2. Pokud chcete žínky použít teplé, zahřejte celé balení v mikrovlnné troubě při 750 W, nezahřívajte na více než 20 sekund.

Upozornění: Balení nesmí být rozpálené!

3. Štítek znovu zalepte, abyste udrželi teplotu žínek.
4. Při mytí jednoho pacienta spotřebujte celé balení.

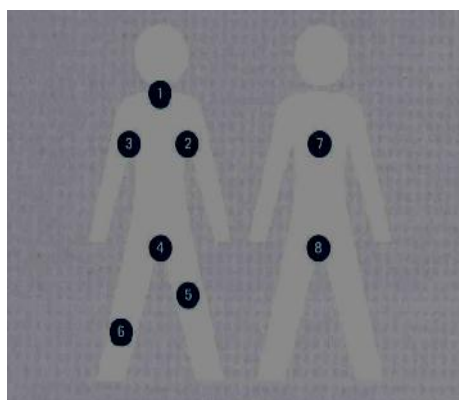

1. obličej, krk, trup
2. levá ruka, podpaždí
3. pravá ruka, podpaždí
4. intimní zóna
5. levá noha
6. pravá noha
7. záda
8. hýždě


Obsahuje:

- obsahuje vitamín E, provitamín B5 a přírodní extrakty.

Balení:

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
 Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

| | | |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NÁVOD K POUŽITÍ | |  ... intenzivní péče |
| Název výrobku: | | |
| ANTIBAKTERIÁLNÍ NAVLHČENÁ HYGIENICKÁ ŽÍNKÁ | | Katalogové číslo |
| Hygiena - H | Počet stran:2/2 | 75.990.00.006 |

8 žínek

Krabice:

24 balení

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:



Britts Care B.V.

Molenvlietlaan 12

3271 BM Mijnsheerenland

Nizozemí

www.britts-care.com

Distributor:



Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!