


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
PROPPER OK PROUŽKOVÝ – STERILIZAČNÍ INDIKÁTOR		Katalogové číslo
Kontrolní systémy pro sterilizaci - K	Počet stran: 1/2	Viz. níže

Popis výrobku:

- Propper OK proužkový sterilizační indikátor, dvě délky
- Dle DIN-EN 867-1, třída D

katalogové číslo	Délka (cm)
20.002.64.103	20,3 cm
20.002.64.101	10,2 cm

Návod k použití:

Baleno v malých baleních. OK proužky Propper mohou být používány pro všechny parní autoklávy pracující při teplotě 121 °C nebo 134 °C. Pokud je postupováno podle návodu, podávají OK proužky viditelný důkaz, že nasycená pára pronikla balením. (písmeno „K“ a → budou stejně tmavé nebo tmavší než písmeno „O“, které slouží jako standard k porovnání černé).

- 1) Umístěte OK proužek do každého balíčku. Konec proužku by se měl nacházet v místě, kde je předpokládán nejobtížnější průnik páry.
- 2) Po ukončení sterilizace si prohlédněte indikátor. Písmeno „K“ a → musejí být černé. Hnědá barva značí podexponování : v tomto případě balíček nepoužívejte, znovu jej přesterilizujte a zjistěte příčinu selhání. Šedá barva značí přeexponování nebo mokrou páru. Také v tomto případě je lépe podmínky upravit.

Skladování:

Skladujte na chladném suchém místě v originálním balení.

Upozornění:


Nepoužívejte po datu expirace

Balení:

250/1000 ks

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
PROPPER OK PROUŽKOVÝ – STERILIZAČNÍ INDIKÁTOR		Katalogové číslo
Kontrolní systémy pro sterilizaci - K	Počet stran: 2/2	Viz. níže

Datum revize textu: 01. 06. 2011

Výrobce:

propper

Propper Manufacturing

36-04 Skillman Avenue

Long Island City, NY 11101

USA

www.proppermfg.com

Distributor:


... intenzivní péče

Dahlhausen CZ spol. s r.o

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!