

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
PROPPER GAS-CHEX PROUŽKOVÝ STERILIZAČNÍ INDIKÁTOR		Katalogové číslo
Kontrolní systémy pro sterilizaci - K	Počet stran: 1/1	20.002.69.002

Popis výrobku:

- pro kontrolu sterilizace ethylen oxidem
- délka 20,3 cm

Návod k použití:

Umístěte Gas-Chex proužek do každého balíčku. Po sterilizaci musí být indikátor **ZELENÝ**. Hnědá barva nebo původní barva značí podexponování – v tomto případě obsah balíčku nepoužívejte, znovu jej přesterilizujte a zjistěte příčinu selhání.

Skladování:

Skladujte na chladném suchém místě v originálním balení.

Upozornění:

Nepoužívejte po datu expirace

Balení:

250 ks

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:

propper

Propper Manufacturing

36-04 Skillman Avenue

Long Island City, NY 11101

USA

www.proppermfg.com

Distributor:


... intenzivní péče

Dahlhausen CZ spol. s r.o

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!