


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
<b>PROPPER VAPOR LINE TM – STERILIZAČNÍ INDIKÁTOR</b>		<b>Katalogové číslo</b>
<b>Kontrolní systémy pro sterilizaci - K</b>	<b>Počet stran:1/1</b>	Viz. níže

**Popis výrobku:**

Parní sterilizační indikátor pro použití v parních sterilizátorech při 121 °C a 134 °C.

Dva typy provedení.

Katalogové číslo	Typ
20.002.69.009	
20.002.69.008	s prodloužením 22,9 cm

**Návod k použití:**

- Umístěte sterilizační indikátor do míst, kde je nejobtížnější průnik páry.
- Zahajte proces parní sterilizace.
- Podle polohy zbarvení kontrolního sloupce odečtěte výsledek testu.

**Vyhodnocení**

Červený pruh s nadpisem „**FAIL**“ nesplnění podmínek sterilizace.

Zelený pruh s nadpisem „**PASS**“ – splnění podmínek sterilizace.

- Jestli-že sterilizační indikátor nedosáhl zeleného zbarvení s nadpisem „**PASS**“ je to náznak, že sterilizační podmínky nebyly splněny. Proto veškerý obsah sterilizátoru vyjměte a znovu přesterilizujte podle standardních nemocničních postupů .
- Po otevření a vyjmutí sterilizačního indikátoru okraj obalu několikrát přeložte. Nevyužité sterilizační indikátory vložte zpět do obalu.

**Balení:**

250/500 ks

**Označení:**

dle ČSN EN ISO 11140-1:2006

**Revize č. 1 :22.9.2011**

**Výrobce:**



**Propper Manufacturing**

36-04 Skillman Avenue

Long Island City, NY 11101

USA

<http://www.proppermfg.com>

**Distributor:**


  
... intenzivní péče

**Dahlhausen CZ spol. s r.o.**

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

[www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**DAHLHAUSEN CZ** , spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**