


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
PROPPER HELIX – ZÁTĚŽOVÁ TESTOVACÍ JEDNOTKA		Katalogové číslo
Kontrolní systémy pro sterilizaci - K	Počet stran: 2	20.002.69.069

Návod k použití:

Zahřejte Helix ve sterilizátoru bez Vapor Line indikátoru. Nechte proběhnout normální sterilizační cyklus při 121 °C nebo 134°C. Je nutné toto provést pouze jednou před prvním zatěžovacím testem.

Po zahřívacím cyklu, vyjměte Helix ze sterilizátoru. Musíte použít žáruvzdorné rukavice.

1. Uchopte jednou rukou kovové pouzdro Helixu a druhou rukou otočte šroubovací uzávěr proti směru hodinových ručiček. Odstraňte uzávěr z pouzdra. Všimněte si, že držák vzorku je připevněný ke spodní části uzávěru.
2. Umístěte Vapor Line indikátor do zářezu v držáku.
Poznámka: vypouklá část indikátoru musí být umístěna v kruhovém otvoru držáku. Vsuňte držák do Helixu a zašroubujte uzávěr otočením ve směru hodinových ručiček.
3. Umístěte Helix s náplní v horizontální pozici na spodní polici sterilizátoru (nad odpad). Ujistěte se, že konec silikonové hadičky je průchodný. Zajistěte dveře sterilizátoru a spusťte normální sterilizační cyklus.
4. Po skončení cyklu, vyjměte Helix ze sterilizátoru, použijte žáruvzdorné rukavice. Odšroubujte uzávěr a vytáhněte Vapor Line indikátor z držáku.
5. V okýnku indikátoru zjistíte výsledek testu pomocí černého indikačního proužku:

Jestliže jakákoliv část černého proužku dosáhne zelené oblasti „PASS“, podmínky sterilizace byly splněny. Jestliže černý proužek dosáhne pouze červené oblasti „FAIL“ nebo není vůbec viditelný, podmínky splněny nebyly. Proto veškerý obsah sterilizátoru vyjměte a znovu přesterilizujte podle standardních nemocničních postupů.

6. Pro přípravu dalšího sterilizačního cyklu umístěte nový Vapor Line indikátor do držáku a postupujte podle bodů 2 až 5.

Poznámka: v laboratorních testech byl Helix podroben 200 úspěšným sterilizačním cyklům při teplotě 134°C bez selhání přístroje.


Údržba a manipulace: nezvedejte nebo nepřenášejte Helix pomocí plastové hadičky, vždy držte za pouzdro. Hadičku nepřehýbejte nebo nepřekrucujte. Před každým sterilizačním cyklem zkontrolujte, že hadička je průchodná. Zkontrolujte pouzdro přístroje a ujistěte se, že je čisté. Skladujte v přiloženém ochranném kufříku.

* V případě, že se hadička ucpe, profoukněte proudem čistého vzduch skrz pouzdro Helixu. Jestliže to nepomůže, zašlete k opravě na níže uvedenou adresu.

Revize č. 1 :22.9.2011

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
PROPPER HELIX – ZÁTĚŽOVÁ TESTOVACÍ JEDNOTKA		Katalogové číslo
Kontrolní systémy pro sterilizaci - K	Počet stran: 2	20.002.69.069

Výrobce:

propper

Propper Manufacturing

36-04 Skillman Avenue

Long Island City, NY 11101

USA

www.proppermfg.com

Distributor:


... intenzivní péče

Dahlhausen CZ spol. s r.o

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!