


NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
PROPPER STERI-DOT TM		Katalogové číslo
Kontrolní systémy pro sterilizaci - K	Počet stran: 1/1	20.003.61.001

Popis výrobku:

- procesové indikační kolečko, průměr 1,4 cm
- pro sterilizaci EO, třída A dle ČSN EN 8672., samolepící vrstva

Návod k použití:

Indikační samolepící terčík Steri-Dot je určen pro kontrolu sterilizovaného materiálu při sterilizaci etylen oxidem. Steri-Dot poskytuje rychlou vizuální kontrolu sterilizovaných položek po ukončení cyklu sterilizace EO.

Červená barva znamená „**stop**“, zelená „**volno**“, tedy položka prošla sterilizačním cyklem a může být uvolněna do dalšího oběhu v rámci nakládání se sterilním zbožím.

Pokud se během sterilizace nedosáhne požadované hodnoty vlhkosti, terčík se nezbarví do zelena, a proces musí být opakován.

Skladování:

Skladujte na suchém větraném místě do 32 °C bez sluneční expozice.

Balení:

Počet v roli : 2000 ks

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:

proper

Propper Manufacturing

36-04 Skillman Avenue

Long Island City, NY 11101

USA

www.proppermfg.com

Distributor:

 **DAHLHAUSEN CZ**
... intenzivní péče

Dahlhausen CZ spol. s r.o

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!