

NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		Katalogové číslo
TOLZIN PRESSECURE RÁM Z NEREZOVÉ OCELI , TESTOVACÍ BALÍK		
Kontrolní systémy pro sterilizaci - K	Počet stran: 1/3	31.000.00.770, 31.000.00.110

Popis výrobku:

- rám z nerezové oceli A6 malý

Systém pro Bowie-Dick Test tvoří tyto součásti :

- PRESSECURE[®] ocelový rám z vysoce kvalitní nerezové oceli o rozměru 220 x 80 x 120 mm
- originální TOLZIN[®] Bowie-Dick testovací arch pro Bowie-Dick Test, 15 x použitelný, nahrazuje standardní rouškový testovací balík vyhovující normě ČSN EN 285+A2 o rozměru 150 x 30 x 115 mm
- Propper Bowie-Dick testovací indikátor o rozměru 115 x 150 mm

Rozměry a tvar testovacího balíčku a jsou přizpůsobeny designu ocelového rámu.

Osvědčený systém TOLZIN[®] PRESSECURE[®] STERITEST Systém pro Bowie-Dick Test (BD Test) umožňuje uživatelům provádět denní kontrolu parních sterilizátorů odpovídajících normě ČSN EN ISO 17665-1 standardizovaně, spolehlivě a levně.

Návod k použití:

1. Připravte ocelový rám a odjistěte svorky.
2. Položte nový BD testovací indikátor na zelené listy archu indikační barvou nahoru a přikryjte bílými listy, tak aby modrý savý papír ležel na indikační barvě testovacího indikátoru.
3. Takto vytvořený testovací balík vložte do ocelového rámu a zajistěte současně obě svorky.
4. Umístěte připravený testovací systém horizontálně (na nožky rámu) do komory sterilizátoru blízko dveří v dolní části komory.
5. Po ukončení testu vyjměte testovací systém ze sterilizátoru, vyjměte testovací indikátor a posuďte výsledek.
6. Je-li odstín testovacího indikátoru rovnoměrně černý, test proběhl úspěšně.
7. V případě neúspěšného výsledku testu nesmí sterilizátor pokračovat v provozu. Opakujte BD test.

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
TOLZIN PRESSECURE RÁM Z NEREZOVÉ OCELI , TESTOVACÍ BALÍK		Katalogové číslo
Kontrolní systémy pro sterilizaci - K	Počet stran: 2/3	31.000.00.770, 31.000.00.110

8. Exponovaný list BD testovacího indikátoru je nutno archivovat.
9. Nevyměňujte ani nemíchejte listy papírového archu během jeho používání. Po každém použití jej nechte proschnout v odjištěném rámu do následujícího dne použití. Rovněž není možné používat jeden arch pro více testování v jeden den



Balení:

1 ks

Revize č. 1 :22.9.2011


DAHLHAUSEN CZ
... intenzivní péče

Výrobce:

proper

Propper Manufacturing

Distributor:

Dahlhausen CZ spol. s r.o

DAHLHAUSEN CZ , spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		Katalogové číslo
TOLZIN PRESSECURE RÁM Z NEREZOVÉ OCELI , TESTOVACÍ BALÍK		
Kontrolní systémy pro sterilizaci - K	Počet stran: 3/3	31.000.00.770, 31.000.00.110

36-04 Skillman Avenue
Long Island City, NY 11101
USA

www.proppermfg.com

Knínická 1577
664 34 Kuřim
Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!