


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
PROPPER TWINDICATOR TM		Katalogové číslo
Kontrolní systémy pro sterilizaci - K	Počet stran: 1/2	20.002.65.103

Popis výrobku:

- indikační proužek pro parní sterilizaci třídy D dle ČSN EN 867-1.
- Délka 20,3 cm

Návod k použití:

Indikační proužek Twindicator je určen pro kontrolu správného sterilizačního cyklu v parním autoklávu při teplotách 120 °C a časové výdrži 9,5 min., resp. 134 °C při výdrži 2,5 min.

Twindicator může být použit buď v celé délce 20 cm nebo v poloviční 10 cm.

Žlutá indikační linka, zbarvená do černé barvy po správném sterilizačním procesu, slouží jako doklad správného sterilizačního cyklu.

- 1) Při použití proužku o celé délce vložte proužek do balíčku tak, aby jeden jeho konec byl umístěn v místě, kde se předpokládá nejproblematictější průnik páry.
- 2) Po vyjmutí z balíčku musí být celá linka, včetně obou konců čáry, shodně zbarvena do plné černé barvy. Hnědé zbarvení linky ukazuje na nedostatečný sterilizační proces, který se musí opakovat. Šedě zbarvená linka naznačuje „přesterilizování“, tedy příliš dlouhou časovou výdrž nebo vyšší teplotu, než je nutno, či příliš vlhkou páru.
- 3) Pokud nepotřebujete použít celý proužek, můžete ho v místě perforace přetřhnout na polovinu a použít stejným způsobem, jako je popsáno výše.

Skladování:

Skladujte na chladném suchém místě v originálním balení.

Upozornění:

Nepoužívejte po datu expirace


Balení:

250/1000 ks

Revize č. 1 :22.9.2011

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
 Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
PROPPER TWINDICATOR TM		Katalogové číslo
Kontrolní systémy pro sterilizaci - K	Počet stran: 2/2	20.002.65.103

Výrobce:

propper

Propper Manufacturing

36-04 Skillman Avenue

Long Island City, NY 11101

USA

www.proppermfg.com

Distributor:


... intenzivní péče

Dahlhausen CZ spol. s r.o

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!