


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
FLAMIGEL		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 1 /3	

FLAMIGEL®

Universální přístup k hojení ran

Indikace

Flamigel je hydroaktivní koloidní gelové krytí. V ráně vytváří a udržuje vlhké prostředí.

Používá se k léčbě a ochraně ne příliš rozsáhlých, suchých či naopak secernujících, sekundárně se hojících ran:

- povrchově popáleniny a odřeniny
- pooperační rány
- proleženiny
- vředy

Vlastnosti

Flamigel obsahuje kyselé polymery, které vytváří v ráně kyselé prostředí. Suchá rána absorbuje vodu, obsaženou ve Flamigelu, tím se vytváří a udržuje vlhké prostředí v ráně, rozpouští se nekrotická tkáň a krusty.

Exsudující rána aktivuje pasivní polymery, které následně absorbují exsudát a udržují vlhké prostředí v ráně.

Flamigel má chladivý účinek. Z rány může být snadno a bezbolestně odstraněn.

Postup

Popáleniny prvního stupně:


Jemně naneste rovnoměrnou vrstvu Flamigelu na ránu

Otevřené rány:

1. ránu vyčistěte,
2. jemně ránu vysušte,
1. naneste silnou vrstvu (5 mm) Flamigelu na ránu,
3. přiložte sekundární rytí, nejlépe semipermeabilní folii,

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
FLAMIGEL		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 2 /3	



Poznámky:

- Flamigel musí zůstat v ráně až do vyčerpání absorpční kapacity, 1 až 3 dny podle typu rány.
- Ve fázi epitelizace aplikujte pouze tenkou vrstvu Flamigelu, zabrání se tím maceraci okrajů rány
- Pokud je nutné chraňte okraje rány

Upozornění:

Vedlejší účinky jako podráždění nebo alergická reakce jsou vzácné. Nepoužívejte Flamigel na oční víčka nebo jako oční gel. V případě kontaminace očí Flamigel vypláchněte tekoucí vodou a navštivte lékaře. Na rozsáhlé a silně exsudující rány se doporučuje použít výrobek se silnější absorpční kapacitou (např. Flaminal) poradte se s lékařem. U infikovaných ran je nezbytná doplňková léčba. U dalších typů ran může být současně aplikována i jiná terapie (např. kompresivní léčba). Poradte se s lékařem.

Skladování

Skladujte v pokojové teplotě (<math><25^0\text{ C}</math>) v původním balení.

Balení:

Dodáváno v tubách 250 ml a 50 ml.


..

Složení:

Aktivní složky: kyselé polymery, Arginin

Neaktivní složky: destilovaná voda, BCFA, Methyl-p-hydroxybenzoát, Prophyl-p-hydroxybenzoát.

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
FLAMIGEL		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 3 /3	

Označení:

C E 0344

Revize č. 1 :22.9.2011

Distributor:



Flen Pharma NV

Blauwesteenstraat 87

2550 Kontich

Belgiím

<http://flenpharma.com>



Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel.: 541 422 070, fax: 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!