


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
FLAMINAL HYDRO		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 1 /4	

FLAMINAL[®] HYDRO

Vlastnosti

Flaminal[®] Hydro je enzymatické hydroaktivní koloidní gelové krytí obsahující alginát. Flaminal[®] Hydro udržuje vlhké prostředí rány a tím podporuje její hojení.

1. Flaminal[®] Hydro udržuje vlhké prostředí v ráně
2. Flaminal[®] Hydro zajišťuje plynulý debridement
3. Flaminal[®] Hydro vytváří antimikrobní prostředí
4. Flaminal[®] Hydro je bezpečný pro kožní buňky
5. Flaminal[®] Hydro je hypoalergenní

Toto je 5 základních vlastností Flaminal[®] Hydro , které zajišťuje bezpečné hojení ran.

Flaminal[®] Hydro je indikován pro slabě až středně exsudující rány, jako například:


- bércový vřed
- diabetický vřed
- popáleniny II. stupně (hluboké, povrchové)
- odřeniny
- pooperační rány
- kožní chirurgie

Způsob použití

Aplikace a převaz Flaminal[®] Hydro jsou jednoduché a bezbolestné. Postupujte následujícím způsobem:

1. Vyčistěte ránu (např. pomocí Flamirins)
2. Jemně ránu vysušte,
3. Naneste silnou vrstvu (5 mm) Flaminalu[®] Hydro
4. Překryjte Flaminal[®] Hydro odpovídajícím krytím. Druh krytí by měl být zvolen v závislosti na typu léze:
 - a. suché rány: transparentní film /polyuretan) nebo mastný tyl s bandáží
 - b. slabě exsudující rány: netkaná textilie s bandáží nebo přilnavým krytím

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
 Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
FLAMINAL HYDRO		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 2 /4	

- c. silně exsudující rány: absorbní neadherentní komprese fixovaná bandáží nebo náplastí



Užitečné rady

- Denně krytí kontrolujte. Pokud gel prosakuje nebo jeví známky spotřebování, naneste novou vrstvu Flaminalu[®] Hydro a znovu překryjte.
- Během léčby Flaminalu[®] Hydro se mohou na okrajích rány objevit suché bělavé alginátové vločky. Není třeba je odstraňovat. Vločky chrání kraje rány před macerací, která zpomaluje proces hojení rány.
- Flaminalu[®] Hydro může zůstat v ráně, dokud není jeho struktura pozměněna (1 až 4 dny, v závislosti na množství exsudátu).
- V počáteční fázi léčby je možné, že bude docházet ke zvětšování rány. Je to běžná fáze hojení, kdy tělo eliminuje odumřelou tkáň.
- Barva alginátu se může lehce měnit podle jeho původu. Změny barvy nemají žádný vliv na kvalitu Flaminalu[®] Hydro.

Speciální doporučení


Bércový vřed: Adhesiva často způsobují alergie, zejména u pacientů s bérčovými vředy. Fixujte bandáží nebo hypoalergenní náplastí.

Kavity: ránu vystelte sterilními gázovými tampony, aplikujte do kavity mezi tampony dostatečné množství Flaminalu[®] Hydro.

Fistule a úzké hluboké kavity: vpravte do rány Flaminal[®] Hydro za pomoci stříkačky nebo kanyly

Silně exsudující rány: naneste silnou vrstvu Flaminal[®] Hydro.

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
FLAMINAL HYDRO		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 3 /4	

Dekubity na patách: naneste Flaminal® Hydro a překryjte jej kompresí ve tvaru písmene V.

Upozornění

U některých ran je třeba doplňkové léčby. Konzultujte s lékařem nebo odborníkem na hojení ran.

Flaminal® Hydro je pod lékařským dohledem možné použít na infikované rány.

Algináty slabě páchnou. Tento zápach nemá na proces hojení žádný vliv. V případě, že se náhle objeví odlišný zápach, konzultujte s lékařem nebo odborníkem na hojení ran.

Flaminal® Hydro není indikován na popáleniny III. Stupně nebo u pacientů s alergií na některou ze složek.

Flaminal® Hydro nelze použít na oční víčka nebo povrch očí. V případě zasažení oka vypláchněte pečlivě oko tekoucí vodou a konzultujte s lékařem.

Skladování

Uchovejte v originálním balení na suchém místě při pokojové teplotě (do 25 °C). Ihned po použití tubu a nádobu znovu uzavřete. Otevřenou tubu je možné používat až do data expirace, za předpokladu, že je po použití vždy znovu uzavíraná. Nádobu 500 g však není možné používat déle než týden po jejím prvním otevření.

Doporučujeme používat každé balení Flaminal® Hydro na jednoho pacienta.

Balení:


Tuba 50 g, nádoba 500 g.

Označení:

C E 0344

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
FLAMINAL HYDRO		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 4 /4	

Revize č. 1 :22.9.2011

Distributor:



Flen Pharma NV

Blauwesteenstraat 87

2550 Kontich

Belgiím

<http://flenpharma.com>



Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ , spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!