


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
FLAMIRINS		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 1 /2	

Popis výrobku:

- izotonický roztok pro hygienu rány

Vlastnosti

- Flamirins ránu čistí
- odlučuje nekrózu a mikroorganismy
- odstraňuje zápach
- je biokompatibilní
- hypo - alergenní
- isotonický roztok
- kyselé pH

Postup

- a) před prvním použitím uvolněte, případně odlomte zámek trysky
- b) nastavte trysku do pozice "SPRAY" (rozprašovač) nebo "STREAM" (proud)
- c) nastříkejte rozprašovačem Flamirins přímo na ránu, tím ránu i mechanicky vyčistíte
- d) ránu opatrně osušte
- e) trysku zajistíte otočením do pozice "OFF" (vypnuto)

Upozornění


Pouze pro vnější použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepoužívejte v případě citlivosti či alergie na obsažené látky. Nepoužívejte jako antiseptikum. Nepoužívejte v blízkosti očí. V případě zasažení vymyjte oči proudem studené vody po dobu alespoň 5 minut. Vyhledejte očního lékaře. Vyhledejte lékaře, pokud se rána nehojí, příp. zhoršuje.

Složení

Purifikovaná voda, chlorid sodný, citrát sodný polysorbát, kyselina citrónová, aloe vera, methylparaben, propylparaben

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
FLAMIRINS		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 2 /2	

Balení:

250 ml

Označení:

0344

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:**Flen Pharma NV**

Blauwesteenstraat 87

2550 Kontich

Belgiím

<http://flenpharma.com>**Distributor:****Dahlhausen CZ spol. s r.o.**

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!