


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SORBSAN FLAT		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 1 /4	Viz. níže

Popis výrobku:

Sorbsan Flat je sterilní kalcium-alginátové krytí z netkané textilie, vysokým obsahem mannuronové kyseliny a nízkým obsahem kyseliny guluronové.

Kat. číslo	rozměry	Ks/bal
1400	5 x 5 cm	10
1410	10 x 10 cm	10
1415	10 x 20 cm	5

Informace o výrobku:

Kalcium alginátová vlákna v kontaktu s povrchem exsudující rány vytváří objemný sodium-kalcium alginátový gel, který

- vytváří prostředí pro vlhké hojení
- přizpůsobuje se tvaru rány
- umožňuje výměnu plynů
- zabraňuje prosakování vlhkosti za okraje rány, není tedy nutné krytí zmenšovat dle velikosti rány
- minimalizuje riziko macerace okolních tkání
- usnadňuje hojení rány
- zachycuje kontaminované bakterie s přebytečným exsudátem ve vnitřní struktuře materiálu
- atraumatický při odstraňování
- při odstraňování tolerantní k nově vytvářené tkáni
- krytí se odstraňuje s 0,9 % koncentrací fyziologického roztoku


Indikace:

Sorbsan Flat se používá na rány se střední až vysokou úrovní exsudace. Jako například:

- povrchové a hluboké rány
- vředy arteriálního a venózního typu
- vředy diabetické nohy
- proleženiny

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SORBSAN FLAT		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 2 /4	Viz. níže

- pooperační rány
- mykotické léze

Sorbsan Flat může být použit v kombinaci s kompresní terapií při léčbě vředů venózního původu, pokud je tak nařízeno lékařem.

Kontraindikace:

Nepoužívejte u pacientů s alergií na kalcium-alginát.

Sorbsan Flat může být použit na infikované rány v případě, že:

- je tak nařízeno lékařem
- je revidována současná léčba
- je dodržena mikrobiální léčba, pokud je nařízena
- je Sorbsan Flat měněn každý den

Nejsou k dispozici žádné údaje o použití přídatných topických preparátů v kombinaci se Sorbsan Flat.


V ranní fázi použití Sorbsanu Flat se rána může zdát zvětšená. Toto předpokládané zvětšení je způsobeno autolitickým debridementem, který předchází granulační a epitelizační fázi.

Stejně jako u ostatních hydrofilických krytí může být pacientem v počátečné fázi použití Sorbsan Flat zaznamenán pocit „stahování“ rány. Tento diskomfort může být redukován zvlhčením Sorbsanu Flat 0,9% fyziologickým roztokem před aplikací.

Během úspěšného hojícího procesu se rána zmenšuje a produkuje méně nebo žádný exsudát. V takovém případě zvažujte použití jiného krytí.

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SORBSAN FLAT		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 3 /4	Viz. níže

V průběhu hojení rány Sorbsan Flat vytváří prostředí a podmínky podporující hojení. Pokud během 4 – 6 týdnů použití Sorbsanu Flat není zaznamenáno zlepšení při hojení rány, revidujte původní diagnózu a způsob léčby.

Sorbsan Flat je sterilní, jednorázový výrobek. Nepoužívejte v případě poškozeného obalu.

Způsob použití:

Sorbsan Flat by měl být aplikován pod lékařským dohledem. Používejte vždy aseptické techniky.

Příprava

- dle zavedených standardů vyčistěte a připravte ránu pro aplikaci Sorbsan Flat
- důkladně očistěte okolní kůži tak, aby na ní nebyly zbytky mastnoty, mýdla nebo detergentů, kůži osušte
- vyberte krytí vhodné velikosti - krytí musí minimálně 5 mm přesahovat přes okraj rány
- Sorbsan Flat nestříhejte a nepřizpůsobujte tvaru rány

Aplikace


- krytí aplikujte centrálně
- před aplikací Sorbsanu Flat může být rána zvlhčena malým množstvím 0,9% fyziologického roztoku
- pokud rána dostatečně nesecernuje, zvažte použití odlišného typu krytí
- aplikujte vhodné sekundární krytí přes Sorbsan Flat, zabráníte tím dehydrataci povrchu rány
- zajistěte náplastí nebo bandáží při dodržení stávajících standardů

Doba použití

- frekvence převazu záleží na typu a stavu rány
- během několika prvních dnů hojení rány, při vysoké exsudaci by měl být Sorbsan Flat měněn denně
- později, s ubývajícím tvorbou exsudátu se prodlužuje délka použití
- při nízké hladině tvorby exsudátu může být krytí ponecháno až 7 dní

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SORBSAN FLAT		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 4 /4	Viz. níže

- u infikovaných ran se Sorbsan Flat mění každý den za současné revize rány

Odstranění

- krytí nejdříve odlepte na obou stranách jednoho konce a potom opatrně sejměte
- sterilním fyziologickým roztokem (0,9%) navlhčete a odstraňte zbývající gel z rány
- dle existujících klinických standardů očistěte ránu

Balení

- každý výrobek je individuálně sterilně balen

Označení

CE
0086

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:



Aspen Surgical Products

6945 Southbelt Dr. SE

Caledonia, MI 49316

USA

www.aspensurgical.com

Distributor:



Dahlhausen CZ spol. s r.o

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!