


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SORBSAN PACKING/RIBBON		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 1 /5	Viz. níže

Popis výrobku :

Sorbsan Ribbon / Packing jsou sterilní kalcium-alginátová krytí z netkané textilie, vysokým obsahem mannuronové kyseliny a nízkým obsahem kyseliny guluronové.

Název	Rozměr	Katalogové číslo
Sorbsan Packing	30 cm/2g	1411
Sorbsan Ribbon	40 cm/1g	1412

Informace o výrobku :

Kalcium alginátová vlákna v kontaktu s povrchem exsudující rány vytváří objemný sodium-kalcium alginátový gel, který

- vytváří prostředí pro vlhké hojení
- přizpůsobuje se tvaru rány
- umožňuje výměnu plynů
- usnadňuje hojení rány
- zachycuje kontaminované bakterie s přebytečným exsudátem ve vnitřní struktuře materiálu
- atraumatický při odstraňování
- při odstraňování tolerantní k nově vytvářené tkáni
- krytí se odstraňuje s 0,9% koncentrací fyziologického roztoku

Sorbsan Ribbon / Packing jsou vybaveny sterilní plastickou sondou, která ulehčí odhad velikosti a tvaru krytí.

Indikace


Sorbsan Ribbon / Packing se používají na rány se střední až vysokou úrovní exsudace.

Sorbsan Packing je vhodný pro péči o větší, vlhké rány.

Sorbsan Ribbon je vhodný k ošetření menších, vlhkých ran jako jsou například fistule či dutiny.

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SORBSAN PACKING/RIBBON		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 2 /5	Viz. níže

Jako například:

- dermoidální cysty
- proleženiny
- pooperační rány
- mykotické léze

Kontraindikace

Nepoužívejte u pacientů s alergií na kalcium-alginát.

Sorbsan Ribbon / Packing mohou být použity na infikované rány v případě, že:

- je tak nařízeno lékařem
- je revidována současná léčba
- je dodržena mikrobiální léčba, pokud je nařízena
- je Sorbsan Ribbon / Packing měněn každý den

Nejsou k dispozici žádné údaje o použití přídavných topických preparátů v kombinaci se Sorbsan Ribbon / Packing.

V ranní fázi použití Sorbsanu se rána může zdát zvětšená. Toto předpokládané zvětšení je způsobeno autolitickým debridementem, který předchází granulační a epitelizační fázi.


Stejně jako u ostatních hydrofilických krytí může být pacientem v počátečné fázi použití Sorbsanu zaznamenán pocit „stahování“ rány. Tento diskomfort může být redukován zvlhčením Sorbsanu 0,9% fyziologickým roztokem před aplikací.

Během úspěšného hojícího procesu se rána zmenšuje a produkuje méně nebo žádný exsudát.

V takovém případě zvažujte použití jiného krytí.

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SORBSAN PACKING/RIBBON		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 3 /5	Viz. níže

V průběhu hojení rány Sorbsan vytváří prostředí a podmínky podporující hojení. Pokud během 4 – 6 týdnů použití Sorbsanu není zaznamenáno zlepšení při hojení rány, revidujte původní diagnózu a způsob léčby.

Sorbsan Ribbon by neměl být používán na rány, které jsou menší než šířka plastické sondy.

Sorbsan Ribbon nebo Sorbsan Packing by neměl být těsně připevněn k ráně.

Sorbsan Ribbon / Packing jsou sterilní, jednorázové výrobky. Nepoužívejte v případě poškozeného obalu.

Způsob použití:

Sorbsan Ribbon / Packing by měl být aplikován pod lékařským dohledem. Používejte vždy aseptické techniky.

Příprava:

- dle zavedených standardů vyčistěte a připravte ránu pro aplikaci Sorbsan Ribbon / Packing
- odhadněte velikost rány, vyplňte dutinu rány Sorbsanem Packing / Ribbon


Aplikace Sorbsan Packing:

- pomocí přiložené sondy odhadněte velikost a hloubku rány
- když je vstupní otvor dostatečně široký, vyplňte dutinu rány Sorbsanem Packing, ale ne příliš těsně
- ujistěte se, že část Sorbsanu Packing po vyplnění dutiny vyčnívá ven, asi 2 cm
- pokud rána dostatečně nesecernuje, zvažte použití odlišného typu krytí
- aplikujte vhodné sekundární krytí přes Sorbsan Packing, zabráníte tím dehydrataci povrchu rány

Sorbsan Ribbon:

- pomocí přiložené sondy odhadněte velikost a hloubku rány

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
 Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SORBSAN PACKING/RIBBON		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 4 /5	Viz. níže

- pokud je vstupní otvor rány menšího průměru než sonda, změňte úmysl použít Sorbsan Ribbon
- když je vstupní otvor dostatečně široký, vyplňte dutinu rány Sorbsanem Ribbon, ale ne příliš těsně
- ujistěte se, že část Sorbsanu Ribbon po vyplnění dutiny vyčnívá ven, asi 2 cm
- pokud rána dostatečně nesecernuje, zvažte použití odlišného typu krytí
- aplikujte vhodné sekundární krytí přes Sorbsan Ribbon, zabráníte tím dehydrataci povrchu rány

Doba použití:

- při výměně sekundárního krytí měňte i výplň rány
- během několika prvních dnů hojení rány, při vysoké exsudaci by měl být Sorbsan Packing / Ribbon měněn denně
- později, s ubývajícím tvorbou exsudátu se prodlužuje délka použití
- při nízké hladině tvorby exsudátu může být krytí ponecháno až 7 dní
- rány by měly být revidovány pod dohledem ošetřujícího lékaře
- u infikovaných ran se Sorbsan Ribbon/Packing mění každý den za současné revize rány

Odstranění:

- dle existujících klinických standardů odstraňte sekundární krytí
- za vyčnívající konec Sorbsanu Packing / Ribbon opatrně vyjměte z rány celou délku výplně
- 0,9% fyziologickým roztokem vypláchněte dutinu rány a odstraňte zbytky gelu
- aplikujte nový Sorbsan Packing / Ribbon a překryjte sekundárním krytím


Balení:

- každý výrobek je individuálně sterilně zabalen

Označení:


0086

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
 Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SORBSAN PACKING/RIBBON		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 5 /5	Viz. níže

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:



Aspen Surgical Products

6945 Southbelt Dr. SE

Caledonia, MI 49316

USA

www.aspenmedicaleurope.com

Distributor:



Dahlhausen CZ spol. s r.o

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!