


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SORBSAN PLUS CARBON		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 1 /5	Viz. níže

Popis výrobku:

Krytí na rány Sorbsan Plus Carbon se skládá ze sterilní vrstvy kalcium alginátu, která je v kontaktu s ranou, a druhé vrstvy z absorpční viskózy vybavené uhlíkovou látkou.

Kat. číslo	rozměry	Ks/bal
1420C	7,5 x 10 cm	5
1421C	10 x 15 cm	5
1422C	10 x 20 cm	5
1423C	15 x 20 cm	5

Sorbsan Plus Carbon je vybořený z netkané textilie a obsahuje vysoký podíl kyseliny mannuronové a nízký podíl kyseliny guluronové. Sekundární viskózní vrstva absorbuje přebytečný exsudát. Tato kombinace vytváří krytí s velmi vysokou absorpční schopností.


Informace o výrobku:

Kalcium alginátová vlákna v kontaktu s povrchem exsudující rány vytváří objemný sodium-kalcium alginátový gel, který:

- vytváří prostředí pro vlhké hojení
- přizpůsobuje se tvaru rány
- umožňuje výměnu plynů
- zabraňuje prosakování vlhkosti za okraje rány, není tedy nutné krytí zmenšovat dle velikosti rány
- minimalizuje riziko macerace okolních tkání
- usnadňuje hojení rány
- zachycuje kontaminované bakterie s přebytečným exsudátem ve vnitřní struktuře materiálu
- atraumatické při odstraňování
- při odstraňování tolerantní k nově vytvářené tkáni
- krytí se odstraňuje pomocí fyziologického roztoku

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
 Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SORBSAN PLUS CARBON		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 2 /5	Viz. níže

Sekundární viskózní vrstva:

- absorbuje pomocí vrstvy, která je v kontaktu s tkání, přebytečný exsudát
- vlákna se rozpínají laterálně, čímž je zajištěna větší absorpční kapacita
- udržuje exsudát mimo povrch rány, tím je minimalizováno riziko macerace
- není třeba používat další absorbující sekundární krytí

Uhlík obsažený ve výrobku absorbuje zápach z rány nebo exsudátu.

Modrá vrchní vrstva Sorbsanu Plus Carbon jednoznačně určuje jakou stranou má být krytí umístěno na ránu.

Indikace

Sorbsan Plus Carbon je určen na silně secernující rány, jako například:

- povrchové a hluboké rány
- vředy arteriálního a venózního typu
- vředy diabetické nohy
- proleženiny
- pooperační rány
- mykotické léze

Sorbsan Plus Carbon může být použit v kombinaci s kompresní terapií při léčbě vředů venózního původu, pokud je tak nařízeno lékařem.

Kontraindikace


Nepoužívejte u pacientů s alergií na kalcium-alginát, viskózu, nebo jakoukoliv jinou složku obsaženou v Sorbsanu Plus Carbon.

Sorbsan Plus Carbon může být použit na infikované rány v případě, že:

- je tak nařízeno lékařem
- je revidována současná léčba

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
 Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SORBSAN PLUS CARBON		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 3 /5	Viz. níže

- jsou diagnostikovány příčiny vedoucí ke vzniku rány
- je dodržena mikrobiální léčba, pokud je nařízena
- Sorbsan Plus Carbon je měněn dostatečně často, aby byla zaručena inspekce rány

Nejsou k dispozici žádné údaje o použití topických preparátů v kombinaci se Sorbsan Plus Carbon.

V ranní fázi použití Sorbsanu Plus Carbon se rána může zdát zvětšená. Toto předpokládané zvětšení je způsobeno autolitickým debridementem, který předchází granulační a epitelizační fázi.

Stejně jako u ostatních hydrofilních krytí může být pacientem v počátečné fázi použití Sorbsan Plus Carbon zaznamenán pocit „stahování“ rány. Tento diskomfort může být redukován zvlhčením Sorbsanu fyziologickým roztokem před aplikací.

Během úspěšného hojícího procesu se rána zmenšuje a produkuje méně nebo žádný exsudát. V takovém případě zvažte použití jiného krytí.

V průběhu hojení rány Sorbsan Plus Carbon vytváří prostředí a podmínky podporující hojení. Pokud během 4 týdnů používání Sorbsanu Plus Carbon není zaznamenáno zlepšení při hojení rány, revidujte původní diagnózu a způsob léčby.


Sorbsan Plus Carbon je sterilní, jednorázový výrobek. Nepoužívejte v případě poškozeného obalu.

Způsob použití:

Sorbsan Plus Carbon by měl být aplikován pod lékařským dohledem. Používejte vždy aseptické techniky.

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 <small>... intenzivní péče</small>
Název výrobku:		
SORBSAN PLUS CARBON		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 4 /5	Viz. níže

Příprava

- dle zavedených standardů vyčistěte a připravte ránu pro aplikaci Sorbsan Plus Carbon
- důkladně očistěte okolí rány, aby na ní nebyly zbytky mastnoty, mýdla nebo detergentů, kůži osušte
- vyberte krytí vhodné velikosti - krytí musí minimálně 5 mm přesahovat okraj rány
- Sorbsan Plus Carbon nestříhejte a nepřizpůsobujte tvaru rány

Aplikace

- umístěte Sorbsan Plus Carbon alginátovou vrstvou směrem dolů, modrou vrstvou směrem nahoru vůči ráně
- krytí aplikujte centrálně
- před aplikací Sorbsanu Plus Carbon může být rána zvlhčena malým množstvím fyziologického roztoku. Pokud však rána neprodukuje dostatečné množství exsudátu, zvažte použití jiného typu krytí
- krytí zajistěte náplastí nebo bandáží dle existujících standardů
- není třeba aplikovat sekundární absorpční krytí


Doba použití

- pokud je exsudát viditelný přes modrou vrstvu náplasti, nebo pokud již zápach není Sorbsanem Plus Carbon absorbován, dosáhlo krytí své absorpční kapacity a je nutné je vyměnit
- během několika prvních dnů hojení rány, při vysoké exsudaci, je možné, že rána bude vyžadovat denně výměnu krytí
- později, s ubývajícím tvorbou exsudátu se prodlužuje délka použití
- při nízké hladině tvorby exsudátu může být krytí ponecháno až 7 dní
- u infikovaných ran je nutno Sorbsan Plus Carbon měnit častěji. Vždy za přítomnosti lékaře, současného zhodnocení rány, zjištění příčin, vedoucích ke vzniku rány a příslušné ATB léčby

Odstranění

- krytí odstraňujte dle platných standardů

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
 Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SORBSAN PLUS CARBON		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 5 /5	Viz. níže

- nejdříve odlepte rohy na jedné straně krytí a potom opatrně sejměte
- sterilním fyziologickým roztokem (0,9%) navlhčete a odstraňte zbývající gel z rány
- dle existujících klinických standardů očistěte ránu, poté aplikujte novou vrstvu krytí

Balení

- každý kus je jednotlivě sterilně balen

Označení:

CE
0086

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:



Aspen Surgical Products

6945 Southbelt Dr. SE

Caledonia, MI 49316

USA

www.aspensurgical.com

Distributor:



Dahlhausen CZ spol. s r.o

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!