


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SORBSAN PLUS		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 1 / 5	Viz. níže

Popis výrobku:

Krytí na rány Sorbsan Plus se skládá ze sterilní vrstvy kalcium alginátu, která je v kontaktu s ranou a druhé vrstvy z absorpční viskózy.

	Kat. číslo	rozměry	Ks/bal
SORBSAN PLUS NA	1420	7,5 x 10 cm	5
	1421	10 x 15 cm	5
	1422	10 x 20 cm	5
	1423	15 x 20 cm	5
SORBSAN PLUS SA	1420SA	7,5 x 10 cm aktivní plocha	10
	1421SA	10 x 15 cm aktivní plocha	10
	1422SA	10 x 20 cm aktivní plocha	5
	1423SA	15 x 20 cm aktivní plocha	5

Sorbsan Plus obsahuje vysoký podíl kyseliny mannuronové a nízký podíl kyseliny guluronové. Sekundární viskózová vrstva absorbuje přebytečný exsudát. Tato kombinace vytváří krytí s velmi vysokou absorpční schopností.


Informace o výrobku:

Kalcium alginátová vlákna v kontaktu s povrchem exsudující rány vytváří objemný sodium-kalcium alginátový gel, který

- vytváří prostředí pro vlhké hojení
- přizpůsobuje se tvaru rány
- umožňuje výměnu plynů
- zabraňuje prosakování vlhkosti za okraje rány, není tedy nutné krytí zmenšovat dle velikosti rány
- minimalizuje riziko macerace okolních tkání
- usnadňuje hojení rány
- zachycuje kontaminované bakterie s přebytečným exsudátem ve vnitřní struktuře materiálu

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SORBSAN PLUS		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 2 /5	Viz. níže

- atraumatické při odstraňování
- při odstraňování tolerantní k nově vytvářené tkáni
- krytí se odstraňuje s 0,9% koncentrací fyziologického roztoku

Sekundární viskózní vrstva absorbuje vlhkost celou plochou, přičemž s ranou kontaktní plocha tímto není ovlivněna – okolí rány tak nemaceruje. Nahrazuje eventuální sekundární krytí.

Modrá vrchní vrstva Sorbsanu Plus jednoznačně určuje jakou stranou má být krytí umístěno na ránu.

Indikace:

Sorbsan Plus je určen na silně secernující rány. Jako například:

- povrchové a hluboké rány
- vředy arteriálního a venózního typu
- vředy diabetické nohy
- proleženiny
- pooperační rány
- mykotické léze

Sorbsan Plus může být použit v kombinaci s kompresní terapií při léčbě vředů venózního původu, pokud je tak nařízeno lékařem.


Kontraindikace:

Nepoužívejte u pacientů s alergií na kalcium-alginát nebo viskózu.

Sorbsan Plus může být použit na infikované rány v případě, že:

- je tak nařízeno lékařem
- je revidována současná léčba
- je dodržena mikrobiální léčba, pokud je nařízena
- Sorbsan Plus je měněn každý den

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SORBSAN PLUS		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 3 /5	Viz. níže

Nejsou k dispozici žádné údaje o použití topických preparátů v kombinaci se Sorbsan Plus.

V ranní fázi použití Sorbsanu Plus se rána může zdát zvětšená. Toto předpokládané zvětšení je způsobeno autolitickým debridementem, který předchází granulační a epitelizační fázi.

Stejně jako u ostatních hydrofilických krytí může být pacientem v počátečné fázi použití Sorbsan Plus zaznamenán pocit „stahování“ rány. Tento diskomfort může být redukován zvlhčením Sorbsanu 0,9% fyziologickým roztokem před aplikací.

Během úspěšného hojícího procesu se rána zmenšuje a produkuje méně nebo žádný exsudát. V takovém případě zvažujte použití jiného krytí.

V průběhu hojení rány Sorbsan Plus vytváří prostředí a podmínky podporující hojení. Pokud během 4 – 6 týdnů použití Sorbsanu Plus není zaznamenáno zlepšení při hojení rány, revidujte původní diagnózu a způsob léčby.

Sorbsan Plus je sterilní, jednorázový výrobek. Nepoužívejte v případě poškozeného obalu.

Způsob použití:


Sorbsan Plus by měl být aplikován pod lékařským dohledem. Používejte vždy aseptické techniky.

Příprava

- dle zavedených standardů vyčistěte a připravte ránu pro aplikaci Sorbsan Plus
- důkladně očistěte okolní kůži tak, aby na ní nebyly zbytky mastnoty, mýdla nebo detergentů, kůži osušte
- vyberte krytí vhodné velikosti - krytí musí minimálně 5 mm přesahovat přes okraj rány
- Sorbsan Plus nestříhejte a nepřizpůsobujte tvaru rány
-

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SORBSAN PLUS		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 4 /5	Viz. níže

Aplikace

- umístěte Sorbsan Plus alginátovou vrstvou směrem dolů, modrou vrstvou směrem nahoru vůči ráně
- krytí aplikujte centrálně
- před aplikací Sorbsanu Plus může být rána zvlhčena malým množstvím 0,9% fyziologického roztoku
- pokud rána dostatečně nesecernuje, zvažte použití odlišného typu krytí
- krytí zajistěte náplastí nebo bandáží dle existujících standardů
- není třeba aplikovat sekundární krytí

Doba použití

- pokud je exsudát viditelný přes modrou vrstvu náplasti, Sorbsan Plus dosáhl absorpční kapacity a měl by být vyměněn
- během několika prvních dnů hojení rány, při vysoké exsudaci by měl být Sorbsan Plus měněn denně
- později, s ubývajícím tvorbou exsudátu se prodlužuje délka použití
- při nízké hladině tvorby exsudátu může být krytí ponecháno až 7 dní
- u infikovaných ran se Sorbsan Plus mění každý den za současné revize rány

Odstranění

- krytí nejdříve odlepte na obou stranách jednoho konce a potom opatrně sejměte
- sterilním fyziologickým roztokem (0,9%) navlhčete a odstraňte zbývající gel z rány
- dle existujících klinických standardů očistěte ránu


Balení

- každý výrobek je individuálně sterilně balen

Označení:



DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SORBSAN PLUS		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 5 /5	Viz. níže

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:



Aspen Surgical Products

6945 Southbelt Dr. SE

Caledonia, MI 49316

USA

www.aspensurgical.com

Distributor:



Dahlhausen CZ spol. s r.o

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ , spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!