


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SORBSAN SILVER PACKING/RIBBON		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 1 /5	Viz. níže

### Popis výrobku:

Sorbsan Silver Packing / Ribbon je sterilní kalcium-alginátové krytí z netkané textilie napuštěné stříbrem, vysokým obsahem mannuronové kyseliny a nízkým obsahem kyseliny guluronové.

Název	Rozměr	Katalogové číslo
<b>Sorbsan Silver Packing</b>	30 cm/2g	Ag1411
<b>Sorbsan Silver Ribbon</b>	40 cm/1g	Ag1412

### Informace o výrobku:

Kalcium alginátová vlákna Sorbsan Silver Packing/ Ribbon v kontaktu s povrchem exsudující rány vytváří objemný sodium-kalcium alginátový gel, který :

- vytváří prostředí pro vlhké hojení
- přizpůsobuje se tvaru rány
- umožňuje výměnu plynů
- zabraňuje prosakování vlhkosti za okraje rány, není tedy nutné krytí zmenšovat dle velikosti rány
- minimalizuje riziko macerace okolních tkání
- usnadňuje hojení rány
- zachycuje kontaminované bakterie s přebytečným exsudátem ve vnitřní struktuře materiálu
- atraumatický při odstraňování
- při odstraňování tolerantní k nově vytvářené tkáni
- krytí se odstraňuje s 0,9% koncentrací fyziologického roztoku
- impregnované stříbro ve výrobku zabíjí širokou škálu bakterií v ráně


Sorbsan Silver Packing / Ribbon se dodává s jednorázovou sterilní plastovou sondou k odhadu velikosti a tvaru rány

### Indikace:

Sorbsan Silver Packing / Ribbon se používá na rány se střední až vysokou úrovní exsudace. Jako například:

- povrchové a hluboké rány

**DAHLHAUSEN CZ**, spol. s r.o.,  
 Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
<b>SORBSAN SILVER PACKING/RIBBON</b>		<b>Katalogové číslo</b>
<b>Hojení ran - R</b>	<b>Počet stran: 2 /5</b>	Viz. níže

- vředy arteriálního a venózního typu
- vředy diabetické nohy
- proleženiny
- pooperační rány
- mykotické léze

Sorbsan Silver Packing / Ribbon může být použit na rány, které jsou infikované, nebo kterým infikování hrozí.

#### **Kontraindikace:**

Nepoužívejte u pacientů s alergií na kalcium-alginát nebo stříbro.

#### **Upozornění:**

Nejsou k dispozici žádné údaje o použití přídatných topických preparátů v kombinaci se Sorbsan Silver Packing/ Gibbon.


V ranní fázi použití Sorbsanu Silver Packing / Ribbon se rána může zdát zvětšená. Toto předpokládané zvětšení je způsobeno autolitickým debridementem, který předchází granulační a epitelizační fázi.

Stejně jako u ostatních hydrofilických krytí může být pacientem v počátečné fázi použití Sorbsan Silver Packing / Ribbon zaznamenán pocit „stahování“ rány. Tento diskomfort může být redukován zvlhčením Sorbsanu Silver Packing/ Ribbon 0,9% fyziologickým roztokem před aplikací.

Během úspěšného hojícího procesu se rána zmenšuje a produkuje méně nebo žádný exsudát. V takovém případě zvažujte použití jiného krytí.

**DAHLHAUSEN CZ**, spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SORBSAN SILVER PACKING/RIBBON		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 3 /5	Viz. níže

V průběhu hojení rány Sorbsan Silver Packing / Ribbon vytváří prostředí a podmínky podporující hojení. Pokud během 4 týdnů použití Sorbsanu Silver Packing / Ribbon není zaznamenáno zlepšení při hojení rány, revidujte původní diagnózu a způsob léčby.

Nevyplňujte ránu Sorbsanem Silver Packing/ Ribbon příliš těsně.

Sorbsan Silver Packing / Ribbon je sterilní, jednorázový výrobek. Nepoužívejte v případě poškozeného obalu.

Zabraňte kontaktu s elektrodami nebo vodivými gely během elektronického měření, např. EKG nebo ECG.

Nepoužívejte u pacientů, kteří podstupují vyšetření magnetickou rezonancí.

### Způsob použití:

Sorbsan Silver Packing / Ribbon by měl být aplikován pod lékařským dohledem. Používejte vždy aseptické techniky.

### Příprava


- dle zavedených standardů vyčistěte a připravte ránu pro aplikaci Sorbsan Silver Packing / Ribbon
- odhadněte velikost rány vyplňte dutinu rány Sorbsanem Silver Packing / Ribbon

### Aplikace

- pomocí přiložené sondy odhadněte velikost a hloubku rány
- pokud je vstupní otvor rány menšího průměru než sonda, změňte úmysl použít Sorbsan Silver Packing / Ribbon
- když je vstupní otvor dostatečně široký, vyplňte dutinu rány Sorbsanem Silver Packing / Ribbon , ale ne příliš těsně

**DAHLHAUSEN CZ** , spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**

NÁVOD K POUŽITÍ		 <small>... intenzivní péče</small>
Název výrobku:		
SORBSAN SILVER PACKING/RIBBON		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 4 /5	Viz. níže

- ujistěte se, že část Sorbsanu Silver Packing / Ribbon po vyplnění dutiny vyčnívá ven, asi 2 cm
- pokud rána dostatečně nesecernuje, zvažte použití odlišného typu krytí
- aplikujte vhodné sekundární krytí přes Sorbsan Silver Packing / Ribbon , zabráníte tím dehydrataci povrchu rány

### Doba použití

- při výměně sekundárního krytí měňte i výplň rány
- během několika prvních dnů hojení rány, při vysoké exsudaci by měl být Sorbsan Silver Packing / Ribbon měněn denně
- později, s ubývající tvorbou exsudátu se prodlužuje délka použití
- při nízké hladině tvorby exsudátu může být krytí ponecháno až 7 dní
- rány by měly být revidovány pod dohledem ošetřujícího lékaře

### Odstranění

- dle existujících klinických standardů odstraňte sekundární krytí
- za vyčnívající konec Sorbsanu Silver Packing / Ribbon opatrně vyjměte z rány celou délku výplně
- 0,9% fyziologickým roztokem vypláchněte dutinu rány a odstraňte zbytky gelu
- aplikujte nový Sorbsan Silver Packing / Ribbon a překryjte sekundárním krytím


### Balení

- každý výrobek je individuálně sterilně zabalen
- 5 ks/bal.

### Označení:



**DAHLHAUSEN CZ** , spol. s r.o.,  
 Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
<b>SORBSAN SILVER PACKING/RIBBON</b>		<b>Katalogové číslo</b>
Hojení ran - R	Počet stran: 5 /5	Viz. níže

Revize č. 1 :22.9.2011

**Výrobce:**



**Aspen Surgical Products**

6945 Southbelt Dr. SE

Caledonia, MI 49316

USA

[www.aspensurgical.com](http://www.aspensurgical.com)

**Distributor:**



**Dahlhausen CZ spol. s r.o**

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

[www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**DAHLHAUSEN CZ**, spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**