


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SORBSAN SILVER PLUS		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 1 /5	Viz. níže

Popis výrobku :

Krytí na rány Sorbsan Silver Plus se skládá ze sterilní vrstvy kalcium alginátu napuštěné stříbrem, která je v kontaktu s ranou a druhé vrstvy z absorpční viskózy.

Sorbsan Silver Plus obsahuje vysoký podíl kyseliny mannuronové a nízký podíl kyseliny guluronové. Sekundární viskózová vrstva absorbuje přebytečný exsudát. Tato kombinace vytváří krytí s velmi vysokou absorpční schopností.

	Kat. číslo	rozměry	Ks/bal
SORBSAN PLUS NA	Ag1420	7,5 x 10 cm	5
	Ag1421	10 x 15 cm	5
	Ag1422	10 x 20 cm	5
	Ag1423	15 x 20 cm	5
SORBSAN PLUS SA	Ag1420SA	7,5 x 10 cm aktivní plocha	10
	Ag1421SA	10 x 15 cm aktivní plocha	10
	Ag1422SA	10 x 20 cm aktivní plocha	5
	Ag1423SA	15 x 20 cm aktivní plocha	5


Informace o výrobku:

Stříbrem napuštěná kalcium alginátová vlákna v kontaktu s povrchem exsudující rány vytváří objemný sodium-kalcium alginátový gel, který

- vytváří prostředí pro vlhké hojení
- přizpůsobuje se tvaru rány
- umožňuje výměnu plynů
- zabraňuje prosakování vlhkosti za okraje rány, není tedy nutné krytí zmenšovat dle velikosti rány
- minimalizuje riziko macerace okolních tkání
- usnadňuje hojení rány
- zachycuje kontaminované bakterie s přebytečným exsudátem ve vnitřní struktuře materiálu

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
 Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SORBSAN SILVER PLUS		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 2 /5	Viz. níže

- atraumatické při odstraňování
- při odstraňování tolerantní k nově vytvářené tkáni
- krytí se odstraňuje s 0,9% koncentrací fyziologického roztoku

Sekundární viskózní vrstva absorbuje vlhkost celou plochou, přičemž s ranou kontaktní plocha tímto není ovlivněna – okolí rány tak nemaceruje. Nahrazuje eventuelní sekundární krytí.

Modrá vrchní vrstva Sorbsanu Silver Plus jednoznačně určuje jakou stranou má být krytí umístěno na ránu.

Indikace

Sorbsan Silver Plus je určen na silně secernující rány. Jako například:

- povrchové a hluboké rány
- vředy arteriálního a venózního typu
- vředy diabetické nohy
- proleženiny
- pooperační rány
- mykotické léze

Sorbsan Silver Plus může být použit v kombinaci s kompresní terapií při léčbě vředů venózního původu, pokud je tak nařízeno lékařem.


Kontraindikace

Nepoužívejte u pacientů s alergií na kalcium-alginát nebo viskózu.

Nejsou k dispozici žádné údaje o použití topických preparátů v kombinaci se Sorbsan Silver Plus.

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SORBSAN SILVER PLUS		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 3 /5	Viz. níže

V ranní fázi použití Sorbsanu Silver Plus se rána může zdát zvětšená. Toto předpokládané zvětšení je způsobeno autolitickým debridementem, který předchází granulační a epitelizační fázi.

Stejně jako u ostatních hydrofilických krytí může být pacientem v počátečné fázi použití Sorbsan Silver Plus zaznamenán pocit „stahování“ rány. Tento diskomfort může být redukován zvlhčením Sorbsanu 0,9% fyziologickým roztokem před aplikací.

Během úspěšného hojícího procesu se rána zmenšuje a produkuje méně nebo žádný exsudát. V takovém případě zvažujte použití jiného krytí.

V průběhu hojení rány Sorbsan Silver Plus vytváří prostředí a podmínky podporující hojení. Pokud během 4 – 6 týdnů použití Sorbsanu Silver Plus není zaznamenáno zlepšení při hojení rány, revidujte původní diagnózu a způsob léčby.

Sorbsan Silver Plus je sterilní, jednorázový výrobek. Nepoužívejte v případě poškozeného obalu.

Zabraňte kontaktu s elektrodami nebo vodivými gely během vyšetření jako je EEG a EKG.

Nepoužívejte u pacientů podstupujících Magnetickou rezonanci.

Způsob použití


Sorbsan Silver Plus by měl být aplikován pod lékařským dohledem. Používejte vždy aseptické techniky.

Příprava

- dle zavedených standardů vyčistěte a připravte ránu pro aplikaci Sorbsan Silver Plus
- důkladně očistěte okolní kůži tak, aby na ní nebyly zbytky mastnoty, mýdla nebo detergentů, kůži osušte
- vyberte krytí vhodné velikosti - krytí musí minimálně 5 mm přesahovat přes okraj rány

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SORBSAN SILVER PLUS		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 4 /5	Viz. níže

- Sorbsan Silver Plus nestříhejte a nepřizpůsobujte tvaru rány

Aplikace

- umístěte Sorbsan Silver Plus alginátovou vrstvou směrem dolů, modrou vrstvou směrem nahoru vůči ráně
- krytí aplikujte centrálně
- před aplikací Sorbsanu Silver Plus může být rána zvlhčena malým množstvím 0,9% fyziologického roztoku
- pokud rána dostatečně nesecernuje, zvažte použití odlišného typu krytí
- krytí zajistěte náplastí nebo bandáží dle existujících standardů
- není třeba aplikovat sekundární krytí

Doba použití

- pokud je exsudát viditelný přes modrou vrstvu náplasti, Sorbsan Silver Plus dosáhl absorpční kapacity a měl by být vyměněn
- během několika prvních dnů hojení rány, při vysoké exsudaci by měl být Sorbsan Silver Plus měněn denně
- později, s ubývající tvorbou exsudátu se prodlužuje délka použití
- při nízké hladině tvorby exsudátu může být krytí ponecháno až 7 dní
- u infikovaných ran se Sorbsan Silver Plus mění každý den za současné revize rány


Odstranění

- krytí nejdříve odlepte na obou stranách jednoho konce a potom opatrně sejměte
- sterilním fyziologickým roztokem (0,9%) navlhčete a odstraňte zbývající gel z rány
- dle existujících klinických standardů očistěte ránu

Balení

- každý výrobek je individuálně sterilně balen

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
 Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
SORBSAN SILVER PLUS		Katalogové číslo
Hojení ran - R	Počet stran: 5 /5	Viz. níže

Označení:



Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:



Aspen Surgical Products

6945 Southbelt Dr. SE

Caledonia, MI 49316

USA

www.aspensurgical.com

Distributor:



Dahlhausen CZ spol. s r.o

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!