


NÁVOD K POUŽITÍ		 DAHLHAUSEN CZ ... intenzivní péče
Název výrobku:		
FONENDOSKOP TYP PANASCOPE		Katalogové číslo
Spotřební materiál - S	Počet stran:	Viz. níže

Popis výrobku:

Panascope je oboustranný profesionální fonendoskop pro dospělé.

katalogové číslo:	barva
76.001.00.004	černá
76.001.00.200	různé

Návod k použití:

Před použitím zkontrolujeme vizuálně stav všech spojů, dotažení membrány a její neporušenost. Otvory v olivkách a oboustranné hlavici musejí být bez nečistot.

Dbáme na úplné zasazení olivek do naslouchací lyry.

U oboustranných fonendoskopů nastavíme požadovanou snímací stranu otočením hadičky v blízkosti hlavice.

Čištění:

Běžné čištění provádíme saponátovými prostředky.

Je nutno zabránit vniknutí čistící nebo desinfekční kapaliny do olivek nebo hlavice.

Používané desinfekční roztoky nesmějí být agresivní vůči PVC a kovům.

Záruční doba: 2 roky

Balení:

1 ks


Označení:



Datum revize textu: 01. 06. 2011

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 <small>... intenzivní péče</small>
Název výrobku:		
FONENDOSKOP TYP PANASCOPE		Katalogové číslo
Spotřební materiál - S	Počet stran:	Viz. níže

Výrobce:



Kardio VS s.r.o.

Jinačovice u Brna č.206

664 34 Kuřim

Česká republika

www.kardiovs.cz

Distributor:



Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!