


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
FONENDOSKOP TYP RAPPAPORT		Katalogové číslo
Spotřební materiál - S	Počet stran:	76.001.00.220

Popis výrobku:

Rappaport je oboustranný profesionální fonendoskop pro dospělé.

Návod k použití:

Dejte sluchadla do uší, lehkým přiložením membrány umožníte procházení zvuku, a poznáte je li nastaven ve správné pozici, neslyšíte-li zvuk. Otáčejte hlavicí dokud neuslyšíte kliknutí.

Možnost konverze do 5 cest. Tato vlastnost umožňuje využít fonendoskop jako 5 jiných fonendoskopů pro 5 různých účelů . 3 různé velikosti válce hlavice doplňují 2 originální a tvoří kompletní set.

Velká membrána: Obecně se používá k poslechu srdečních ozev nízkých frekvencí, diastol. a 3. srdečního zvuku. Srdeční šum o vysoké intenzitě je také detekovatelný.

Malá membrána: Pro poslech srdečního rytmu malých dětí ,vysoká intenzity.

Redukce pro dospělé: Přesně určí nízké a střední intenzity zvuku a šumu.

Střední velikost redukce: Soustředěná na úzké místa mezi žebry nebo jiné malá místa tak aby detekovala nízké a střední intenzity zvuku nebo šumu.

Dětská velikost redukce: Nejlepší volba pro lékařské vyšetření kojenců a malých dětí. Umožňuje skvělou detekci zvuku a šumu o nízké a střední intenzitě.

Balení:

1 ks

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:



Kardio VS s.r.o.

Jinačovice u Brna č.206

664 34 Kuřim

Česká republika

www.kardiovs.cz

Distributor:



Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ , spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!