


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
RYCHLÉ CHLADOVÉ SÁČKY QUICK COLD		Katalogové číslo
Spotřební materiál - S	Počet stran: 1/1	93.000.00.048

Popis výrobku:

Chladová komprese u akutních stavů.

Použití:

1. Setřeste obsah na dno sáčku.
2. Nahmatejte vnitřní sáček a silně jej stiskněte, abyste rozdrtili jeho obsah.
3. Obsah vnitřního sáčku protřeste, abyste jej dobře promíchali.

Upozornění:

- Vyvarujte se přímého dotyku s kůží. Quick Cold sáček zabalte do měkké látky, abyste předešli omrzlinám. Nepoužívejte sáčky, které prosakují nebo jsou proděravěny.
- V případě požití obsahu vyhledejte lékaře. Pokud roztok zasáhne oči, pokožku nebo otevřenou ránu, vymyjte zasažené místo vodou a vyhledejte lékaře.
- Skladujte mimo dosah dětí při teplotě -30 °C.

Obsah:

dusičnan amonný, voda

Balení:

1 ks

Označení:

 **0123**

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce:

 **DAHLHAUSEN®**

P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:

 **DAHLHAUSEN CZ**
... intenzivní péče

Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!