


<b>NÁVOD K POUŽITÍ</b>		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
<b>STUDENÉ/TEPLÉ KOMPRESIVNÍ BRÝLE</b>		<b>Katalogové číslo</b>
<b>Spotřební materiál - S</b>	<b>Počet stran:</b>	93.600.00.100

**Popis výrobku:**

Pro léčebné použití jako studený nebo teplý obklad.

- rovnoměrný přenos tepla či chladu
- netoxický gel-obsahuje hořké látky
- omyvatelný běžnými dezinfekčními prostředky
- ohebný i po zmražení
- odolný PA/PE obal

**Návod pro přípravu studených brýlí :**

Ponechte asi 2 hod. v mrazicím boxu.

**Návod pro přípravu teplých brýlí :**

Ponechte asi 10 min. ve vodě o teplotě max.70 °C nebo zahřejte v mikrovlnné troubě dle instrukcí pro její použití.

**Upozornění pro studené i teplé použití :**

Po 20 minutách nasazení brýlí přerušte asi na 30 min. před dalším nasazením. V případě nejistoty, zda použít studený či teplý obklad, se obraťte na svého lékaře.

**Balení:**

1 ks

**Označení:**

  0123

**Revize č. 1 :22.9.2011**

**Výrobce:**

 **DAHLHAUSEN®**

**P.J. Dahlhausen & Co. GmbH**

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

**Distributor:**

 **DAHLHAUSEN CZ**  
... intenzivní péče

**Dahlhausen CZ spol. s r.o.**

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

[www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**DAHLHAUSEN CZ**, spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**