


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
MOČOVÉ SÁČKY TYP D-4, D-6		Katalogové číslo
Urologie - U	Počet stran:1/2	viz. níže

Popis výrobku:

Typ D-4, 2,0 l, s vypouštěcím ventilem, uzavřená drenáž moči


Typ D-6, 2,0 l, s vypouštěcím ventilem, uzavřený systém jímání moči, Pasteurova komůrka, antireflexní ventil

- S místem pro odběr vzorků.
- S bezpečnostní blokovací komorou.
- Se svorkami na připevnění k posteli a s připevňovacím páskem.
- Se závorou zpětného proudu.
- S antibakteriálním zavzdušňovacím filtrem.
- Výpustné zařízení.

katalogové číslo	typ	ks
53.712.02.000	D-4	50
53.712.06.000	D-6	20

Návod k použití:

1. Místo odběru vzorků moči na konektoru umožňuje odběr vzorků moči pomocí stříkačky typu Luer. Dezinfikujte místo odběru.
2. Nasad'te stříkačku typu Luer na střed gumové stopky. Pro odběr s pomocí běžné stříkačky propíchněte vnější okraj gumové stopky jehlou, abyste zabránili výtoku moči. Nevhodné pro tupé kanyly.
3. Upevněte svorky k posteli podle obrázku, abyste zajistili přívod hadičky.

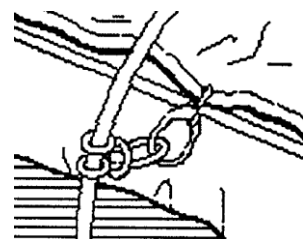

Upozornění:

Sterilní je pouze v případě, že je obal neotevřený a nepoškozený.

Označení:


STERILE|EO

CE 0123

Datum revize textu: 01. 06. 2011

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
MOČOVÉ SÁČKY TYP D-4, D-6		Katalogové číslo
Urologie - U	Počet stran:2/2	viz. níže

Výrobce:



P.J. Dahlhausen & Co. GmbH

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de

Distributor:



Dahlhausen CZ spol. s r.o.

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!