


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
UROPRI 600 SOUPRAVA PRO MĚŘENÍ HODINOVÉ DIURÉZY		Katalogové číslo
Urologie - U	Počet stran: 1/2	53.712.08.000

Popis výrobku:

- vzestupná dvoukomorová kalibrace:
 - v intervalu po 1 ml do 80 ml
 - v intervalu po 10 ml do 600 ml
- celková kapacita 2600 ml
- Pasterova komůrka brání vzlínání infekce ze sběrného kontejneru zpět do hadice
- antirefluxní ventil na sběrném sáčku zabraňuje zpětnému toku moči
- integrovaný port na konektoru umožňuje bezjehelný a bezpečný odběr vzorků pomocí stříkačky
- závěs a fixační pásy zajišťují pevné uchycení na jakýkoli rám lůžka
- 120 cm dlouhá, měkká hadička s klemou odolná proti zlomení
- vertikální vyprazdňování sběrného kontejneru zabezpečuje dokonalé odstranění reziduální moči
- použití sterilního uzavřeného systému snižuje riziko kontaminace

Návod k použití:

1. Zkontrolujte kohout uzavírající sběrný kontejner, zda je nastaven v pozici zavřeno.
2. Místo odběru vzorků moči na konektoru umožňuje odběr vzorků moči pomocí stříkačky typu Luer. Dezinfikujte místo odběru.
3. Nasad'te stříkačku typu Luer na střed gumové stopky. Pro odběr s pomocí běžné stříkačky propíchněte vnější okraj gumové stopky jehlou, abyste zabránili výtoku moči. Nevhodné pro tupé kanyly.
4. Upevněte svorky k posteli podle obrázku, abyste zajistili přívod hadičky.

Upozornění:

Doporučené délka použití do 14 dnů.

Sterilní je pouze v případě, že je obal neotevřený a nepoškozený.

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!

NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
UROPRI 600 SOUPRAVA PRO MĚŘENÍ HODINOVÉ DIURÉZY		Katalogové číslo
Urologie - U	Počet stran:2/2	53.712.08.000

Balení:

1 /10

Označení:

STERILE|EO

CE 0123

Revize č. 1 :22.9.2011

Výrobce: **DAHLHAUSEN®****P.J. Dahlhausen & Co. GmbH**

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

www.dahlhausen.de**Distributor:** **DAHLHAUSEN CZ**
... intenzivní péče**Dahlhausen CZ spol. s r.o.**

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

www.dahlhausen.cz

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.,
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071
info@dahl.cz, www.dahlhausen.cz

NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!