


NÁVOD K POUŽITÍ		 ... intenzivní péče
Název výrobku:		
MOČOVÝ SÁČEK PRO DĚTI		Katalogové číslo
Urologie - U	Počet stran:1/1	76.380.42.000

**Popis výrobku:**

Samolepicí močový sáček bez vypouštěcího ventilu, unisex

**Návod k použití:**

1. Odstraňte krycí papír lepící vrstvy.
2. **Použití pro děvčátka:** umístěte sáček tak, aby otvorem překrýval horní část genitálií,
3. **Použití pro chlapce:** umožněte vniknutí penisu skrze otvor sáčku.
4. Po získání potřebného množství moči odstraňte sáček a opatrně přeložte lepící díl na polovinu, obě části k sobě přilepte, tím sáček těsně uzavřete.

**Upozornění:**

Nepoužívejte pro dlouhodobou drenáž moči

Po vyjmutí z obalu vizuálně zkontrolujte, zda není výrobek poškozen.

**Balení:**

100 ks

**Označení:**

 0123

Revize č. 1 :22.9.2011

**Výrobce:**



**P.J. Dahlhausen & Co. GmbH**

Emil-Hoffmann-Strasse 53

50996 Köln

Germany

[www.dahlhausen.de](http://www.dahlhausen.de)

**Distributor:**



**Dahlhausen CZ spol. s r.o.**

Knínická 1577

664 34 Kuřim

Česká republika

[www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**DAHLHAUSEN CZ**, spol. s r.o.,  
Knínická 1577, 664 34 Kuřim, tel. : 541 422 070, fax : 541 422 071  
[info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz), [www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)

**NÁVOD K POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!**