



**EXVASIN™**

Externí  
fixace  
cévního  
vstupu

Selektivní komprese  
cévy při zachování  
průtoku krve

Transparentní  
provedení umožňuje  
vizuální kontrolu  
cévního vstupu

Elastická – hygienická – rychlá

# EXVASIN™

*Provedte endovaskulární intervenci standardním způsobem. Ponechte zavaděč na místě. Kůže v okolí místa vpichu musí být čistá a suchá. (V případě potřeby odmastěte.)*




*Plynulým pohybem odstraňte zavaděč a proveďte kompresi prsty. Držte cca 1 minutu. (Při koagulopatiích může být doba nutná pro manuální kompresi delší.)*





3

*Povytáhněte zavaděč cca 2-3 cm. Umístěte tlakový polštářek na místo vpichu (1/3 polštářku distálně, 2/3 proximálně). EXVASIN napněte a přilepte po obvodu předloktí pro zajištění jeho správné funkce.*

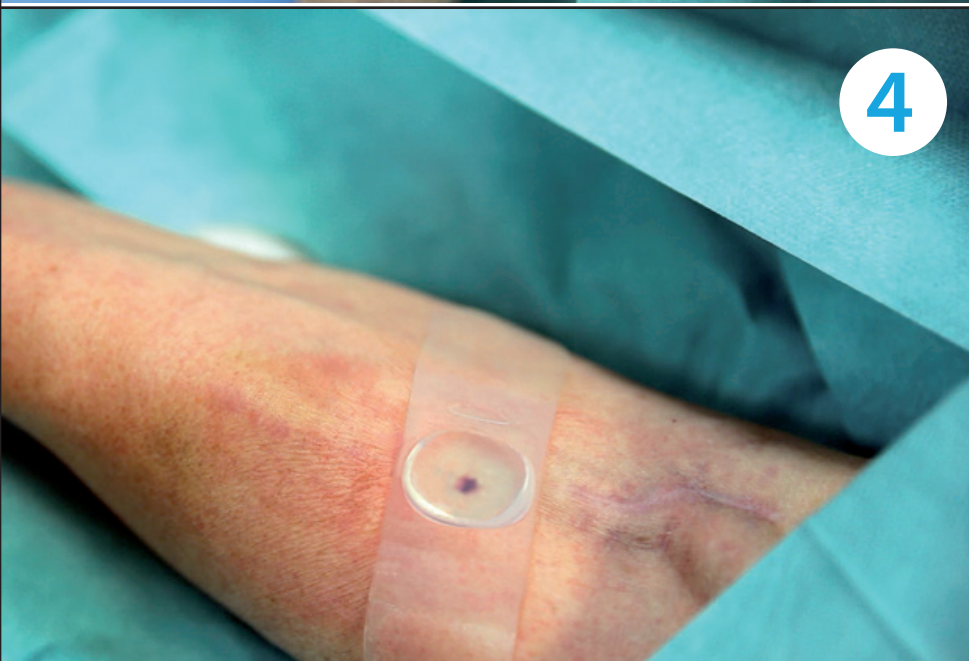

4

*EXVASIN musí být umístěn tak, aby docházelo k hemostáze při zachování kontinuálního průtoku krve.*

Indikace: EXVASIN™ je určen pro zajištění efektivní hemostáze u cévních vstupů. Lze ho použít pro uzavírání arteriálních vstupů zejména u endovaskulárních diagnostických i terapeutických výkonů. Dále také v primární péči, pooperační péči a intenzivní medicíně. EXVASIN™ je určen k nahrazení/zkrácení nutné manuální komprese v místech arteriálního vstupu až do průměru 2,5 mm.





## Objednací informace:

### EXVASIN™

EXVASIN™ is a trademark of VostraMed. Photo(s) on file at VostraMed. All drawings are artist's representations only and should not be considered as an engineering drawing or photograph. Procedures with above device shall only be carried out by physicians/medical professionals who are familiar with the use of the device as well as with possible complications. Prior to use, it is important to read package insert thoroughly for instructions for use, warnings and potential complications associated with the use of this device. Please check regulatory status of the device before distribution in areas where CE marking is not the regulation in force.

© 2017 VostraMed. All rights reserved.

10020-001/003-2017-12

#### Kat.č.

7629999041271

#### Název

EXVASIN™

1 prodejní balení obsahuje 20 ks

**DAHLHAUSEN CZ**  
... intenzivní péče

#### Distributor:

DAHLHAUSEN CZ, spol. s r.o.  
Knínická 1577/8, 664 34 Kuřim  
tel. : 541 422 070  
fax: 541 422 071  
[www.dahlhausen.cz](http://www.dahlhausen.cz)  
e-mail: [info@dahl.cz](mailto:info@dahl.cz)

#### Výrobce:

VostraMed AG  
Baarerstattstrasse 6  
CH-6340 Baar  
Switzerland Phone:  
+41 41 552 25 10  
[www.vostramed.ch](http://www.vostramed.ch)