



... intenzivní péče



Podložky pro hlavu a krk

Podložky pro horní končetiny

Podložky pro trup

Podložky pro dolní část těla

Polohovací sety

Ggelové polohovací podložky

Vlastnosti:

- vyrobeno z viskoelastického gelového polymeru
- poskytuje výbornou ochranu jednotlivých částí těla během operace
- chrání před vznikem dekubitů a poraněním nervů
- RTG transparentní a antibakteriální
- biokompatibilní
- provozní teplota: od - 10 °C do + 50°C
- snadná údržba: čištění a desinfekce
- cenově dostupné
- CE certifikováno

Upozornění:

Podložky je možno ohřívat ve vodní lázni do 37 °C.

NIKDY PODLOŽKY NEOHŘÍVEJTE V MIKROVLNNÉ TROUBĚ!

Podložky je možno chladit v lednici.

NIKDY PODLOŽKY NECHLAĎTE V MRAZÍCÍM BOXU!

Bezpečnostní opatření

1. Zacházejte s podložkou opatrně.
2. Vyvarujte se kontaktu s těžkými nebo ostrými předměty.
3. Nečistěte agresivními dezinfekčními nebo čisticími prostředky. Ideální jsou dezinfekce na bázi alkoholu.
4. Skladujte ve vodorovné poloze, chraňte před přímým slunečním zářením a prachem.
5. Chraňte před ultrafialovým zářením.
6. Pro větší pohodlí pacienta v laterální poloze doporučujeme podložku přikrýt rouškou.
7. Ujistěte se, že podložka přímo pod pacientem je rovná.
8. Čtěte pozorně návod k použití a postupujte podle něho.


Čištění a dezinfekce

1. Gelové podložky z viskoelastického polymeru jsou voděodolné.
2. Nečistoty odstraňte vodou nebo čisticím prostředkem, můžete použít i alkohol.
3. Nedoporučujeme používat silné agresivní dezinfekce, jako je např. jód.
4. Chraňte před vysokou teplotou a tlakem nebo plynovou sterilizací.
5. Nenamáčejte na dlouhou dobu do dezinfekčního prostředku.
6. Nesterilizujte podložky ultrafialovým zářením.



Podložka pod hlavu obličejem dolů

Ochrana a podpora hlavy a obličeje při operacích, prováděných v poloze obličejem dolů. Klenutí podložky zajišťuje dobrý přístup k dýchacím cestám a tím usnadňuje přívod endotracheální tuby pro celkovou anestézii. Podložka může být použita také k rekonvalescenci pacienta po operaci očí.

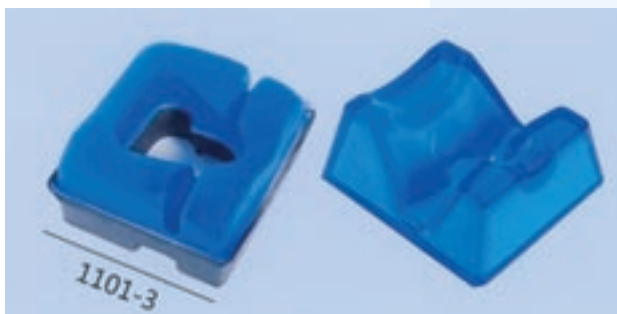


1101 - 1	Rozměry:	28 x 24 x 14 cm
1101 - 2		25 x 20 x 10 cm
1101 - 3	(tvrdý/měkký gel)	23 x 20 x 11 cm
1101 - 4		23 x 20 x 6 cm
1101 - 6	(tvrdý/měkký gel)	28 x 24 x 14 cm
1101 - 8	(tvrdý/měkký gel)	20 x 16 x 11 cm
1101 - 9	(tvrdý/měkký gel)	21 x 18 x 11 cm





Kruhové podložka hlavy

Ochrana hlavy pacienta při různých chirurgických, neurochirurgických, plastických a očních zákrocích včetně ORL.

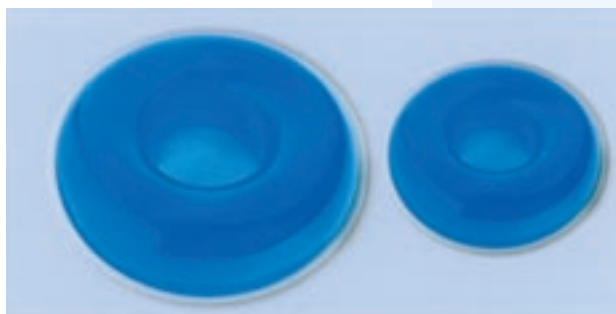

1102 - 1	Rozměry: 20 x 7 x 7 cm
1102 - 2	20 x 7 x 5 cm
1102 - 3 (dětská)	14 x 5 x 3 cm
1102 - 4 (dětská)	10 x 4 x 2,5 cm
1102 - 5 (novorozenecká)	8 x 3 x 2 cm
1102 - 6	20 x 7 x 3 cm
1102 - 7 (dětská)	14 x 7 x 2,5 cm
1102 - 8 (dětská)	14 x 5 x 2,5 cm
1102 - 9	18 x 10 x 3,5 cm
1102 - 10	20 x 12 x 3,5 cm
1102 - 11	22 x 15 x 3,5 cm



Podložka pod hlavu – podkova

Tvar podložky umožňuje dobrý přístup pro zavedení endotracheální tuby při operacích, kdy pacient leží na boku nebo obličejem dolů.



1103 - 1	Rozměry: 20 x 7 x 7 cm
1103 - 2	20 x 7 x 5 cm
1103 - 3 (dětská)	14 x 5 x 3 cm
1103 - 4 (dětská)	10 x 4 x 2,5 cm
1103 - 5 (novorozenecká)	8 x 3 x 2 cm
1103 - 6	20 x 7 x 3 cm
1103 - 7*	20 x 7 x 5 cm

*podložka ve tvaru podkovy bez podkladové folie



Kónická podložka hlavy – miska

Kónické podložky jsou uzpůsobené pro ochranu a podporu hlavy při operacích v horizontální poloze (neurochirurgie a ORL).

1107 - 1	Rozměry: vnější: 20 x 5 cm vnitřní: 8 x 2 cm
1107 - 2 (dětská)	vnější: 14 x 3 cm vnitřní: 6 x 1,5 cm
1107 - 3	vnější: 20 x 5 cm vnitřní: 8,5 x 3 cm



Kónická podložka hlavy – podkova

Podložky ve tvaru podkovy zajišťují pohodlí a stabilitu pacienta při operacích v poloze nznak a na boku. Umožňuje dobrý přístup pro intubaci při celkové anestezii.


1108 - 1	Rozměry: 20 x 5,5 cm
1108 - 2 (dětská)	14 x 3,5 cm



Podložka pod hlavu s bočním vedením

Ochrana a podpora hlavy při očních a maxilofaciálních operacích. Poskytuje vysoký komfort pacientům v lokální anestezii.


1105 - 1	Rozměry: 23 x 23 x 4 cm
1105 - 2	22 x 19 x 6 cm
1105 - 3	24 x 22 x 7 (3,3) cm

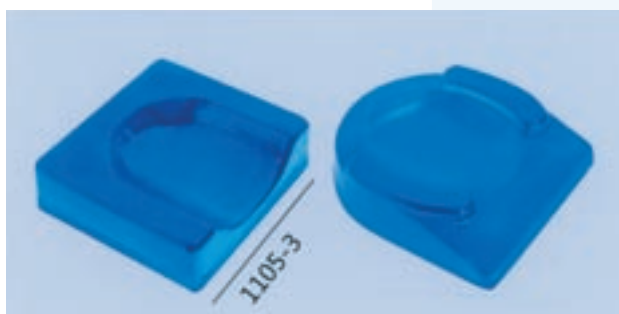



Univerzální podložka pod hlavu

Slouží k uvolnění tlaku na hlavu pacienta, zajišťuje maximální podporu hlavy a prevenci otlaků. Podložku je možné také použít s příslušenstvím operačního stolu. Zajišťí podporu a ochranu kolen a perinea v pozici na boku.

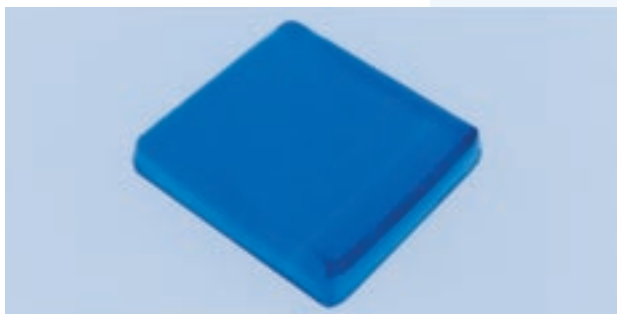


1106 - 1	Rozměry: 25 x 23 x 6 cm
1106 - 2	25 x 18 x 3 cm
1106 - 3	45 x 15 x 10 cm





Univerzální podložka – tvar U

Opora hlavy a krku při operacích v poloze naznak. Možnost využití pro ochranu ramene, boku nebo kolena při operacích na boku.

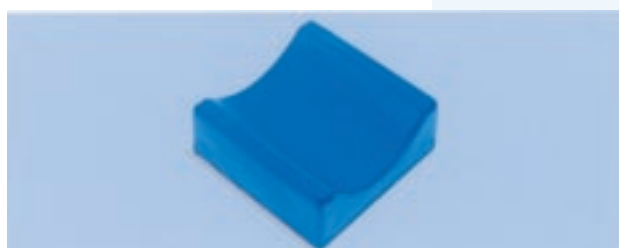

1104

Rozměry: 18 x 18 x 8 cm (4 cm)



Kruhová podložka hlavy – kisoida

Podložky jsou určeny pro podporu hlavy v poloze naznak při neurochirurgických a ORL operacích.

1109 - 1

Rozměry: 20 x 7 x 4 cm (-1,5 cm)

1109 - 2

20 x 9 x 5 cm (-1,5 cm)



Podložka pro tyreodektomii

Ochrana a podpora krku při operacích štítné žlázy.

Podložka pomáhá rozšířit operační pole.

Doporučeno používat v kombinaci s 1110 - 2.



1110 - 1	Rozměry: 40 x 30 x 5 cm
1110 - 2	vnější: 14 x 4,5 cm
	vnitřní: 6 x 3 cm
1110 - 3	48 x 39 x 9 cm





Univerzální podložka pod paži

Ochrana bicepsu, lokte a předloktí.

2101 - 1	Rozměry: 40 x 16 x 1 cm
2101 - 2	60 x 16 x 1 cm
2101 - 3	75 x 16 x 2 cm



Ochrana lokte

Chrání loket a brání poranění nervů.

2102	Rozměry: 40 x 15 x 1,5 cm
------	----------------------------------




Ochrana zápěstí

Chrání zápěstí a brání poranění nervů.

2103	Rozměry: 25 x 5 x 1 cm
2103 - 1	32 x 5 x 1 cm



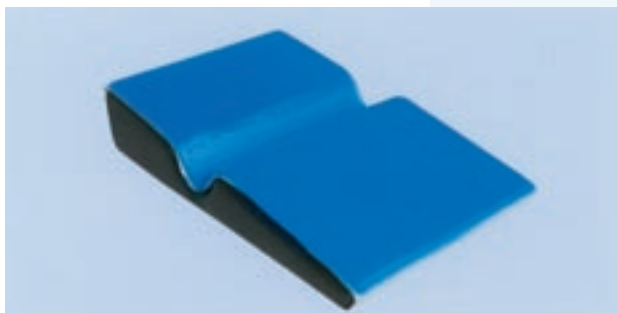

Boční opora

Využití při všech operacích, kdy pacient leží na boku. Poskytuje ochranu ramene a horní končetiny, zmírňuje tlak na nervovou tkáň.

3101 - 1 (tvrzená pěna)

Rozměry: 72 x 46 x 15 cm

3101 - 2 (pěnová výplň)

79 x 50 x 16 cm






Ilustrace použití boční opory

- 1) Nastavte horní část operačního lůžka a položte na něj gelovou podložku.
- 2) Položte pacienta do polohy naznak a proveďte anestezii.
- 3) Přesuňte pacienta do polohy na boku a začněte operaci.



Podložka pro ležící na břiše

Ochrana hrudníku a pánve, snižuje tlak na hrudník, zachovává dobrou úroveň respirační a oběhové funkce při operacích krční páteře.

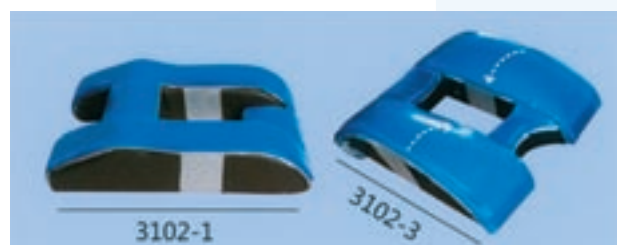

3102 - 1	Rozměry: 63 x 46 x 13 cm
3102 - 3 (pěnová výplň)	60 x 49 x 18 cm




Kyčelní podložka

Ochrana kyčle

3104

Rozměry: 50 x 40 x 1,5 cm

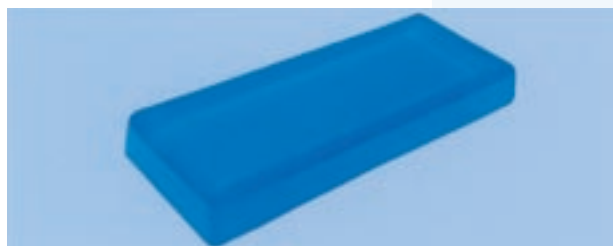

Hrudní - kyčelní podložka

Ochrana hrudníku a pánve, usnadňuje dýchání a oběhové funkce. Chrání před vznikem dekubitů během operací v pozici obličejem dolů. Lze využít i pro podporu ramene při operacích v pozici nznak a k uvolnění celé hrudi při operacích srdce.

3103


Rozměry: 50 x 20 x 7 cm

3103 - 1 (pěnové jádro)

50 x 20 x 7 cm

3103 - 2 (dětská)

7 x 4 x 4 cm

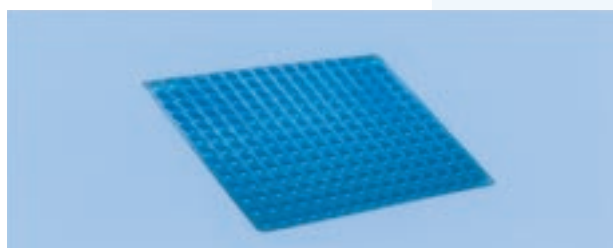

Kuličková čtvercová podložka speciálně vyvinutá pro invalidní vozíky

Ochrana pánve a křížové kosti před tvorbou dekubitů.

3104 - 1

Rozměry: 50 x 40 x 1,8 cm

3104 - 3

40 x 41 x 1,8 cm

3104 - 4

43 x 41 x 1,8 cm

3104 - 5


46 x 41 x 1,8 cm

3104 - 6

46 x 41 x 2,8 cm

3104 - 7

50 x 41 x 2,8 cm

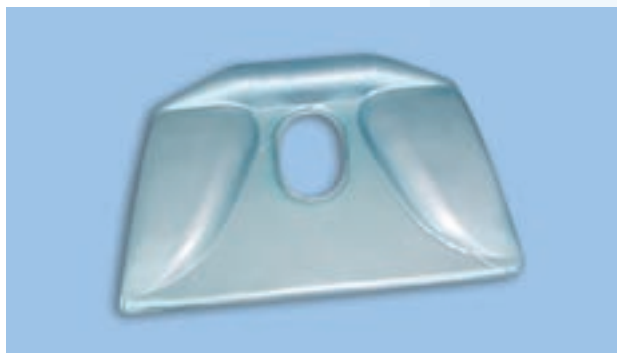


Gelový sedací polštář

Prevence pro dlouhodobě sedící, před a pooperační péče po zákrocích v oblasti pánve a kyčlí.

3104-2

Rozměry: 40 x 30 x 5 cm

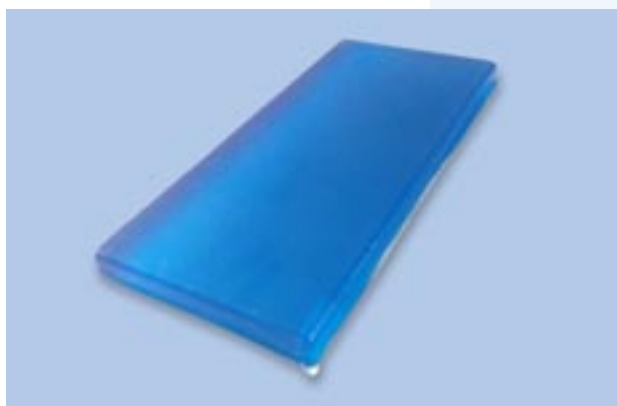

Kyčelní podložka

Prevence pro dlouhodobě sedící, před a pooperační péče po zákrocích v oblasti pánve a kyčlí.

3104-15

Rozměry: 46 x 21 x 2,8



Opěrka pro ortopedický trakční stůl

Chrání před proleženinami v perineální oblasti

3105


Rozměry: 27 x 20 x 1,5 cm



Klínová podložka

Podpora a ochrana oblasti pasu, jater nebo sleziny při polohách s bočním náklonem a naznak. Podložka pomáhá rozšířit operační pole.


3107 - 1	Rozměry: 30 x 18 x 7 cm / 3 cm
3107 - 2	25 x 15 x 6 cm / 2 cm
3107 - 3	30 x 22 x 5 cm / 1 cm
3107 - 4	30 x 13 x 5 cm / 2 cm
3107 - 5	30 x 18 x 12 cm / 8 cm
3107 - 6	50 x 12 x 10 cm / 4 cm

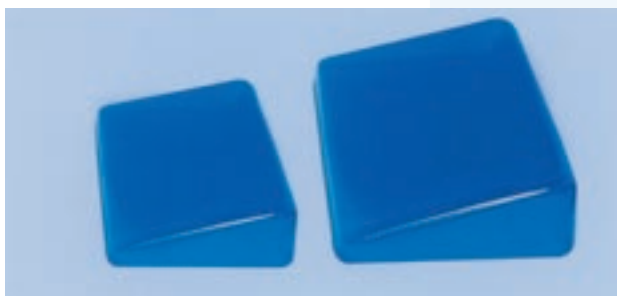

Kvádrová podložka

Kvádrová podložka umožňuje nastavení pozice kotníku a kolena a zajišťuje jejich ochranu a podporu v operační pozici naznak. Může být také využita pro podporu ramene, hrudníku a lopatky v pozici na břiše a k ochraně podpaží v pozici na boku.

3109 - 1	Rozměry: 50 x 12 x 10 cm
3109 - 2	40 x 12 x 10 cm
3109 - 3	30 x 12 x 10 cm
3109 - 4	20 x 12 x 10 cm
3109 - 5 (dětská)	10 x 5 x 5 cm
3109 - 7	25 x 12,5 x 5 cm
3109 - 8	28 x 12 x 5 cm

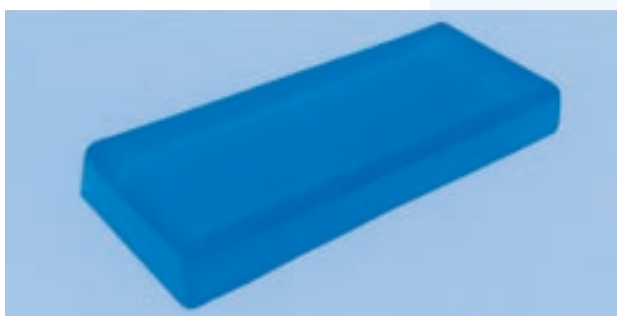

Ochrana těla

Zajišťuje bezpečnou stabilizaci těla a kloubů, chrání před poraněním.

3106	Rozměry: 60 x 7 x 1 cm
------	-------------------------------



Univerzální podložka – půlválec

Ochrana hrudníku a pánve při operacích břicha, pro kotník a koleno v pozici naznak a pro podpažní v pozici na boku. Rozmanité využití při mnoha dalších operacích.

4101 - 1	Rozměry: 30 x 15 x 7 cm
4101 - 2	30 x 10 x 4 cm
4101 - 3	50 x 15 x 7 cm
4101 - 4	50 x 10 x 4 cm
4101 - 5	30 x 10 x 7 cm
4101 - 6	50 x 10 x 7 cm
4101 - 7 (pěnová výplň)	30 x 15 x 7 cm
4101 - 8 (pěnová výplň)	50 x 15 x 7 cm
4101 - 9	20 x 15 x 7 cm
4101 - 10 (dětská)	20 x 10 x 7 cm
4101 - 11	40 x 15 x 7 cm
4101 - 12	50 x 15 x 10 cm
4101 - 13	50 x 10 x 10 cm
4101 - 14	50 x 15 x 12 cm
4101 - 15 (dětská)	25 x 10 x 7 cm
4101 - 16	30 x 22 x 5 cm
4100 - 17	40 x 15 x 4 cm



Ochrana kotníku

Fixace a ochrana kotníku.

4105

Rozměry: 45 x 7 x 1 cm



Laterální podložka pod paži/nohu

Ochrana kolena a paže v pozici obličejem dolů.

4102 - 1	Rozměry: 50 x 15 x 4 cm
4102 - 2	40 x 15 x 4 cm
4102 - 3	60 x 15 x 4 cm
4102 - 5	52 x 14,5 x 5,5 cm
4102 - 6	60 x 15 x 6 cm





Univerzální čtvercová podložka

Podložka se používá na stojany a podpěry nohou. Chrání před dekubity a poraněním nervů, zajišťuje ochranu kolena při litotomii a ramena nebo kyčle v pozici na boku.



4104 - 1	Rozměry: 30 x 20 x 1,5 cm
4104 - 2	40 x 24 x 1,5 cm
4104 - 3	50 x 30 x 1,5 cm
4104 - 4	17 x 11 x 1,5 cm
4104 - 5	50 x 15 x 3,0 cm
4104 - 6	75 x 30 x 1,5 cm
4105 - 10	75 x 50 x 2 cm





Podložka pod patu

Ochrana paty bez použití závěsného zařízení. Pacientův kotník se uloží do výřezu v podložce. Podložka 4103-1 může být také využita pro podporu krku při operacích v poloze nznak.

4103	Rozměry: 15 x 8 x 4,5 cm
4103 - 1	18 x 10 x 7 cm
4103 - 2	42 x 30 x 1 cm



Podložka na operační stůl

Pokrývá celý operační stůl a rovnoměrně rozkládá tělesnou hmotnost pacienta.

5101	(komplet 5101-1, 5101-2, 5101-3)
5101 - 1	Rozměry: 50 x 23 x 1,5 cm (hlava)
5101 - 2	100 x 50 x 1,5 cm (tělo)
5101 - 3	50 x 50 x 1,5 cm (nohy)
5101 - 6	100 x 50 x 1,5 cm (s otvorem)
5101 - 7	50 x 50 x 1,5 cm (s otvorem)
5101 - 10	180 x 50 x 1,5 cm (bez otvoru)

Poloha pacienta na boku - doporučené podložky

Obrázek 1:
Univerzální podložka hlavy 1106-1




Katalog

Název	Kat.č.	Rozměr	Množství
Podkova pod hlavu	1103-2	20x7x5	1
Boční opora	3101-1	72x46x15	1
Lat. pod paži/nohu	4102-1	50x15x4	2
Ochrana těla	3106	60x7x1	1

Název	Kat.č.	Rozměr	Množství
Univerzální půlválec	4101-4	50x10x4	1
Podložka tunel	4107-1	64x46x25	1
Univerzální podložka hlavy	1106-1	25x23x6	1

Poloha pacienta ležícího na břiše - doporučené podložky

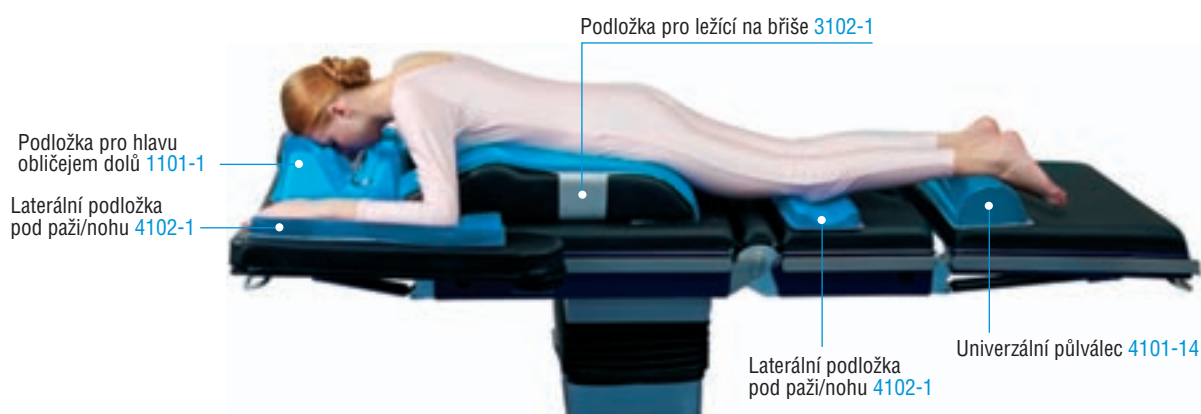

Katalog

Název	Kat.č.	Rozměr	Množství
Podložka pod hlavu obličejem dolů	1101	28x24x14	1
Lat. pod pod. paži/nohu	4102-1	50x15x4	3

Název	Kat.č.	Rozměr	Množství
Podložka pro ležící na břiše	3102-1	63x46x15	1
Univerzální půlválec	4101-14	50x15x12	1

▲ POD.POD

Výše uvedené typy podložek jsou pouze doporučením výrobce. Je nutné provést individuálně odborné posouzení výběru vhodných podložek.

Poloha pacienta na zádech - doporučené podložky



Katalog

Název	Kat.č.	Rozměr	Množství
Podložka pod hlavu kruhová	1102-2	20x7x5	1
Podložka pod hlavu	5101-1	23x50x1,5	1
Podložka na operační stůl	5101-2	100x50x1,5	1
Podložka na operační stůl	5101-3	50x50x1,5	1
Lat. pod. pod paži/nohu	4102-1	50x15x4	2

Název	Kat.č.	Rozměr	Množství
Ochrana zápěstí	2103-1	32x5x1	2
Klínová podložka	3107-3	30x22x5/1	2
Univerzální půlválec	4101-3	50x15x7	2
Podložka pod patu	4103-1	18x10x7	2

Litotomická poloha pacienta - doporučené podložky



Katalog

Název	Kat.č.	Rozměr	Množství
Konická podložka hlavy-miska	1107-1	20x5 (8x2)	1
Univerzální podložka hlavy	1106-1	25x23x6	1
Univerzální podložka pod paži	2101	50x15x4	2

Název	Kat.č.	Rozměr	Množství
Kyčelní podložka	31041	50x40x15	1
Univerzální čtvercová podložka	4104-3	50x30x1,5	2

Výše uvedené typy podložek jsou pouze doporučením výrobce. Je nutné provést individuálně odborné posouzení výběru vhodných podložek.